

INSTRUÇÕES DE USO










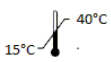

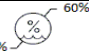
Revisão IU: 00

Data: 07/08/2024

PRODUTO: Kit Cânula Bipolar para Endoscopia Vert-FLEX**NOME TÉCNICO:** Equipamento Cirúrgico para Dissectomia**PRODUTO ESTÉRIL****MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO:** Óxido de Etileno (ETO)**VALIDADE:** 05 anos (após a data da esterilização)**PRODUTO MÉDICO DE USO ÚNICO – PROIBIDO REPROCESSAR**

A simbologia presente na etiqueta, representada através de números é explicada na Tabela 1. A simbologia conforme Norma ISO 15223-1- *Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied -- Part 1: General requirements*

Tabela 1 - Explicação sobre a simbologia da etiqueta.

Símbolo	Descrição	Símbolo	Descrição
	Lote		Data de fabricação e data de validade
	Código do componente		Não usar se a embalagem estiver danificada
	Indicação de produto estéril		Proteger da luz solar
	Indicação de produto de uso único – não reutilizar		Proteger da água
	Apresentação de informações adicionais – consulta do manual de uso		Armazenar em temperatura controlada (15°C – 40°C)
	Dados da empresa		Umidade limite para armazenamento (25% - 60%)

1. Descrição do dispositivo médico

O produto é indicado como coadjuvante no controle hemorrágico por intermédio da eletro cirurgia. Pode ser utilizado para realizar o corte, excisão,

retração, retencionamento ligamentar, coagulação e hemostasia de tecidos moles em procedimentos cirúrgicos, especialmente, mas não limitados a procedimentos neurocirúrgicos, otorrinolaringológicos, cirurgia de cabeça e pescoço e cirurgia da coluna vertebral, sejam eles por via minimamente invasiva endoscópica ou vídeo assistidos.

O Kit Cânula para Endoscopia Vert-FLEX é utilizado em uma variedade de procedimentos minimamente invasivos que envolvem a inserção de um endoscópio através de pequenas incisões na pele. Esses kits são projetados para fornecer acesso e visualização direta de estruturas internas do corpo, permitindo a realização de diagnóstico, tratamento e intervenções terapêuticas.

Durante o procedimento de endoscopia percutânea, as cânulas de acesso são inseridas através da pele e dos tecidos até alcançar a área da coluna vertebral que requer tratamento. O endoscópio é então inserido através das cânulas, fornecendo visualização direta das estruturas da coluna vertebral.

O produto é utilizado para transferir a energia elétrica de geradores eletro cirúrgicos para o tecido alvo (eletro cirurgia bipolar) de forma a obter o efeito desejado durante cirurgias abertas, minimamente invasivas endoscópicas ou vídeo assistidas. É um produto utilizado na coagulação, cauterização e cortes de tecidos moles tais como vasos sanguíneos, mucosas, tecidos sinusais, discos intervertebrais, ligamentos e tecidos articulares diversos e demais tecidos moles do sítio cirúrgico.

Os produtos são compatíveis com geradores eletro cirúrgicos com saída bipolar 1.7MHz / 40 a 120W, que apresentem registro ANVISA.

Seguem abaixo as instruções para o uso do produto:

- ✓ Verifique se a embalagem não está violada, danificada ou molhada;
- ✓ Verifique o prazo de validade do produto;
- ✓ Abra a embalagem e retire o produto acondicionado e selado;
- ✓ Prepare o paciente de acordo com técnicas para procedimentos eletrocirúrgicos;
- ✓ Com o equipamento desativado, conecte o cabo do Eletrodo no equipamento eletro cirúrgico;
- ✓ Ajuste a potência conforme indicado no manual do equipamento eletrocirúrgico;
- ✓ Introduzir o produto no local cirúrgico, utilizando sempre que

possível, cânula de trabalho, trocater ou endoscópio apropriado;

- ✓ Aproximar a ponta ativa do tecido, não sendo necessário o contato direto;
- ✓ Acionar a alça para expor a ponta do eletrodo e aproximar do tecido, acionando os controles do gerador para corte ou coagulação, de acordo com os objetivos e a situação específica do contexto cirúrgico;
- ✓ Realize o procedimento cirúrgico conforme técnica médica aplicável;
- ✓ O produto deve ser descartado após o uso, pois é de USO ÚNICO.

2. Formas de apresentação:

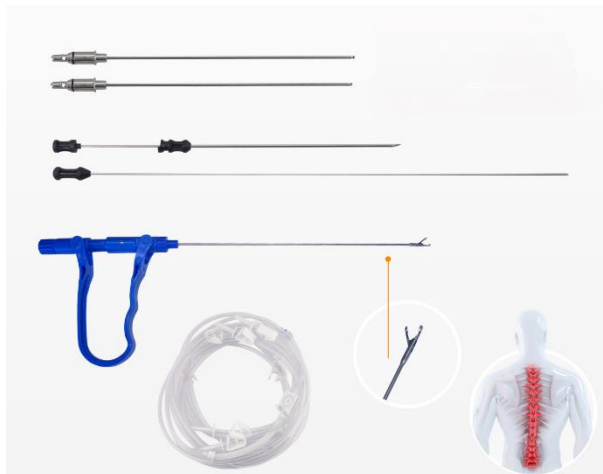


Figura 1: Artigos presentes no Kit. (figura meramente ilustrativa)

2.1. Lista dos dispositivos:

3006630051 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL RZ TIPO 1 EQUIPO 1

- 1 Cânula de Punção 18G x 200mm
- 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm
- 1 CANULA DE Debridação BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ
- 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ
- 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1
- 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm

3006630052 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL RZ TIPO 2 EQUIPO 1

<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630053 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL RZ TIPO 3 EQUIPO 1</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630054 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL RZ TIPO 4 EQUIPO 1</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação BRP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630055 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL RZ TIPO 5 EQUIPO 1</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630056 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL RZ TIPO 6 EQUIPO 1</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação BRP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630057 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL ST TIPO 1 EQUIPO 1</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630058 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL ST TIPO 2 EQUIPO 1</p>

<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630059 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL ST TIPO 3 EQUIPO 1</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630060 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL ST TIPO 4 EQUIPO 1</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BRP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630061 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL ST TIPO 5 EQUIPO 1</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630062 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL ST TIPO 6 EQUIPO 1</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BRP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630063 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL SF TIPO 1 EQUIPO 1</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630064 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL SF TIPO 2 EQUIPO 1</p>

<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630065 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL SF TIPO 3 EQUIPO 1</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630066 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL SF TIPO 4 EQUIPO 1</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BRP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630067 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL SF TIPO 5 EQUIPO 1</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630068 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL SF TIPO 6 EQUIPO 1</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BRP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630069 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL EP TIPO 1 EQUIPO 1</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630070 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL EP TIPO 2 EQUIPO 1</p>

<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630071 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL EP TIPO 3 EQUIPO 1</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630072 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL EP TIPO 4 EQUIPO 1</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BRP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630073 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL EP TIPO 5 EQUIPO 1</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630074 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL EP TIPO 6 EQUIPO 1</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BRP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630075 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL LV TIPO 1 EQUIPO 1</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630076 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL LV TIPO 2 EQUIPO 1</p>

<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630077 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL LV TIPO 3 EQUIPO 1</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630078 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL LV TIPO 4 EQUIPO 1</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação BRP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630079 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL LV TIPO 5 EQUIPO 1</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630080 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL LV TIPO 6 EQUIPO 1</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação BRP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630101 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE RZ TIPO 1 EQUIPO 1</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>

<p>3006630102 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE RZ TIPO 2 EQUIPO 1</p> <p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630103 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE RZ TIPO 3 EQUIPO 1</p> <p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630104 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE RZ TIPO 4 EQUIPO 1</p> <p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630105 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE ST TIPO 1 EQUIPO 1</p> <p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630106 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE ST TIPO 2 EQUIPO 1</p> <p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630107 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE ST TIPO 3 EQUIPO 1</p>

<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630108 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE ST TIPO 4 EQUIPO 1</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630109 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE SF TIPO 1 EQUIPO 1</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630110 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE SF TIPO 2 EQUIPO 1</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630111 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE SF TIPO 3 EQUIPO 1</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630112 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE SF TIPO 4 EQUIPO 1</p>

<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630113 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE EP TIPO 1 EQUIPO 1</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630114 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE EP TIPO 2 EQUIPO 1</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630115 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE EP TIPO 3 EQUIPO 1</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630116 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE EP TIPO 4 EQUIPO 1</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630117 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE LV TIPO 1 EQUIPO 1</p>

<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630118 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE LV TIPO 2 EQUIPO 1</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630119 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE LV TIPO 3 EQUIPO 1</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630120 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE LV TIPO 4 EQUIPO 1</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630121 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE COM RECOBRIMENTO RZ TIPO 1 EQUIPO 1</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação com Recobrimento BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630122 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE COM RECOBRIMENTO RZ TIPO 2 EQUIPO 1</p>

<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação com Recobrimento BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630123 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE COM RECOBRIMENTO RZ TIPO 3 EQUIPO 1</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação com Recobrimento BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630124 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE COM RECOBRIMENTO ST TIPO 1 EQUIPO 1</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação com Recobrimento BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630125 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE COM RECOBRIMENTO ST TIPO 2 EQUIPO 1</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação com Recobrimento BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630126 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE COM RECOBRIMENTO ST TIPO 3 EQUIPO 1</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação com Recobrimento BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>

<p>3006630127 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE COM RECOBRIMENTO SF TIPO 1 EQUIPO 1</p> <p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação com Recobrimento BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 Equipos para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630128 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE COM RECOBRIMENTO SF TIPO 2 EQUIPO 1</p> <p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação com Recobrimento BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 Equipos para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630129 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE COM RECOBRIMENTO SF TIPO 3 EQUIPO 1</p> <p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação com Recobrimento BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 Equipos para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630130 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE COM RECOBRIMENTO EP TIPO 1 EQUIPO 1</p> <p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação com Recobrimento BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 Equipos para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630131 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE COM RECOBRIMENTO EP TIPO 2 EQUIPO 1</p>

<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação com Recobrimento BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630132 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE COM RECOBRIMENTO EP TIPO 3 EQUIPO 1</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação com Recobrimento BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630133 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE COM RECOBRIMENTO LV TIPO 1 EQUIPO 1</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação com Recobrimento BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630134 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE COM RECOBRIMENTO LV TIPO 2 EQUIPO 1</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação com Recobrimento BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630135 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE COM RECOBRIMENTO LV TIPO 3 EQUIPO 1</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação com Recobrimento BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>

<p>3006630136 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE DLC RZ TIPO 1 EQUIPO 1</p> <p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação com DLC BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630137- KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE DLC RZ TIPO 2 EQUIPO 1</p> <p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação com DLC BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630138 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE DLC RZ TIPO 3 EQUIPO 1</p> <p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação com DLC BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630139 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE DLC ST TIPO 1 EQUIPO 1</p> <p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação com DLC BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630140 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE DLC ST TIPO 2 EQUIPO 1</p> <p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação com DLC BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630141 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE DLC ST TIPO 3 EQUIPO 1</p>

<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação com DLC BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630142 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE DLC SF TIPO 1 EQUIPO 1</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação com DLC BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630143 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE DLC SF TIPO 2 EQUIPO 1</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação com DLC BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630144 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE DLC SF TIPO 3 EQUIPO 1</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação com DLC BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630145 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE DLC EP TIPO 1 EQUIPO 1</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação com DLC BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630146 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE DLC EP TIPO 2 EQUIPO 1</p>

<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação com DLC BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630147 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE DLC EP TIPO 3 EQUIPO 1</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação com DLC BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630148 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE DLC LV TIPO 1 EQUIPO 1</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação com DLC BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630149 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE DLC LV TIPO 2 EQUIPO 1</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação com DLC BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630150 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE DLC LV TIPO 3 EQUIPO 1</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação com DLC BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630151 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE W RZ TIPO 1 EQUIPO 1</p>

<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação com W BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630152 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE W RZ TIPO 2 EQUIPO 1</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação com W BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630153 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE W RZ TIPO 3 EQUIPO 1</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação com W BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630154 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE W ST TIPO 1 EQUIPO 1</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação com W BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630155 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE W ST TIPO 2 EQUIPO 1</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação com W BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630156 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE W ST TIPO 3 EQUIPO 1</p>

<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação com W BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630157 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE W SF TIPO 1 EQUIPO 1</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação com W BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630158 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE W SF TIPO 2 EQUIPO 1</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação com W BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630159 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE W SF TIPO 3 EQUIPO 1</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação com W BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630160 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE W EP TIPO 1 EQUIPO 1</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação com W BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630161 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE W EP TIPO 2 EQUIPO 1</p>

<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação com W BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630162 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE W EP TIPO 3 EQUIPO 1</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação com W BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630163 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE W LV TIPO 1 EQUIPO 1</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação com W BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630164 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE W LV TIPO 2 EQUIPO 1</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação com W BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630165 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE W LV TIPO 3 EQUIPO 1</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação com W BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 1 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630166 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL RZ TIPO 1 EQUIPO 2</p>

<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630167 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL RZ TIPO 2 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630168 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL RZ TIPO 3 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630169 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL RZ TIPO 4 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação BRP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630170 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL RZ TIPO 5 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630171 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL RZ TIPO 6 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação BRP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630172 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL ST TIPO 1 EQUIPO 2</p>

<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630173 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL ST TIPO 2 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630174 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL ST TIPO 3 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630175 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL ST TIPO 4 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BRP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630176 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL ST TIPO 5 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630177 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL ST TIPO 6 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BRP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630178 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL SF TIPO 1 EQUIPO 2</p>

<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630179 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL SF TIPO 2 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630180 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL SF TIPO 3 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630181 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL SF TIPO 4 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BRP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630182 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL SF TIPO 5 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630183 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL SF TIPO 6 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BRP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630184 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL EP TIPO 1 EQUIPO 2</p>

<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630185 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL EP TIPO 2 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630186 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL EP TIPO 3 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630187 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL EP TIPO 4 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BRP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630188 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL EP TIPO 5 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630189 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL EP TIPO 6 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BRP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630190 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL LV TIPO 1 EQUIPO 2</p>

<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630191 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL LV TIPO 2 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630192 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL LV TIPO 3 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630193 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL LV TIPO 4 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação BRP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630194 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL LV TIPO 5 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630195 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL LV TIPO 6 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação BRP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630196 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE RZ TIPO 1 EQUIPO 2</p>

<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630197 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE RZ TIPO 2 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630198 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE RZ TIPO 3 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630199 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE RZ TIPO 4 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630200 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE ST TIPO 1 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630201 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE ST TIPO 2 EQUIPO 2</p>

<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630202 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE ST TIPO 3 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630203 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE ST TIPO 4 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630204 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE SF TIPO 1 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630205 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE SF TIPO 2 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630206 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE SF TIPO 3 EQUIPO 2</p>

<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630207 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE SF TIPO 4 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630208 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE EP TIPO 1 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630209 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE EP TIPO 2 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630210 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE EP TIPO 3 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630211 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE EP TIPO 4 EQUIPO 2</p>

<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630212 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE LV TIPO 1 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630213 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE LV TIPO 2 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630214 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE LV TIPO 3 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630215 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE LV TIPO 4 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630216 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE COM RECOBRIMENTO RZ TIPO 1 EQUIPO 2</p>

<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação com Recobrimento BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630217 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE COM RECOBRIMENTO RZ TIPO 2 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação com Recobrimento BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630218 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE COM RECOBRIMENTO RZ TIPO 3 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação com Recobrimento BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630219 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE COM RECOBRIMENTO ST TIPO 1 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação com Recobrimento BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630220 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE COM RECOBRIMENTO ST TIPO 2 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação com Recobrimento BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>

<p>3006630221 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE COM RECOBRIMENTO ST TIPO 3 EQUIPO 2</p> <p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação com Recobrimento BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630222 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE COM RECOBRIMENTO SF TIPO 1 EQUIPO 2</p> <p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação com Recobrimento BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630223 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE COM RECOBRIMENTO SF TIPO 2 EQUIPO 2</p> <p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação com Recobrimento BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630224 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE COM RECOBRIMENTO SF TIPO 3 EQUIPO 2</p> <p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação com Recobrimento BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630225 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE COM RECOBRIMENTO EP TIPO 1 EQUIPO 2</p>

<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação com Recobrimento BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630226 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE COM RECOBRIMENTO EP TIPO 2 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação com Recobrimento BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630227 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE COM RECOBRIMENTO EP TIPO 3 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação com Recobrimento BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630228 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE COM RECOBRIMENTO LV TIPO 1 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação com Recobrimento BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630229 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE COM RECOBRIMENTO LV TIPO 2 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação com Recobrimento BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>

3006630230 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE COM RECOBRIMENTO LV TIPO 3 EQUIPO 2
1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação com Recobrimento BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm
3006630231 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE DLC RZ TIPO 1 EQUIPO 2
1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação com DLC BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm
3006630232 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE DLC RZ TIPO 2 EQUIPO 2
1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação com DLC BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm
3006630233 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE DLC RZ TIPO 3 EQUIPO 2
1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação com DLC BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm
3006630234 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE DLC ST TIPO 1 EQUIPO 2
1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação com DLC BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm
3006630235 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE DLC ST TIPO 2 EQUIPO 2

<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação com DLC BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630236 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE DLC ST TIPO 3 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação com DLC BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630237, - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE DLC SF TIPO 1 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação com DLC BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630238 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE DLC SF TIPO 2 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação com DLC BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630239 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE DLC SF TIPO 3 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação com DLC BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630240 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE DLC EP TIPO 1 EQUIPO 2</p>

<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação com DLC BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630241 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE DLC EP TIPO 2 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação com DLC BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630242 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE DLC EP TIPO 3 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação com DLC BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630243 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE DLC LV TIPO 1 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação com DLC BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630244 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE DLC LV TIPO 2 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação com DLC BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630245 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE DLC LV TIPO 3 EQUIPO 2</p>

<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação com DLC BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630246 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE W RZ TIPO 1 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação com W BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630247 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE W RZ TIPO 2 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação com W BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630248 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE W RZ TIPO 3 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação com W BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630249 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE W ST TIPO 1 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação com W BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630250 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE W ST TIPO 2 EQUIPO 2</p>

<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação com W BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630251 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE W ST TIPO 3 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação com W BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630252 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE W SF TIPO 1 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação com W BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630253 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE W SF TIPO 2 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação com W BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630254 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE W SF TIPO 3 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação com W BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630255 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE W EP TIPO 1 EQUIPO 2</p>

<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação com W BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630256 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE W EP TIPO 2 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação com W BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630257 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE W EP TIPO 3 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação com W BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630258 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE W LV TIPO 1 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação com W BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630259 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE W LV TIPO 2 EQUIPO 2</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação com W BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630260 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE W LV TIPO 3 EQUIPO 2</p>

<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação com W BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630261 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL RZ TIPO 1 EQUIPO L</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630262 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL RZ TIPO 2 EQUIPO L</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630263 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL RZ TIPO 3 EQUIPO L</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630264 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL RZ TIPO 4 EQUIPO L</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação BRP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630265 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL RZ TIPO 5 EQUIPO L</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>

3006630266 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL RZ TIPO 6 EQUIPO L
1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação BRP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm
3006630267 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL ST TIPO 1 EQUIPO L
1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm
3006630268 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL ST TIPO 2 EQUIPO L
1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm
3006630269 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL ST TIPO 3 EQUIPO L
1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm
3006630270 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL ST TIPO 4 EQUIPO L
1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BRP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm
3006630271 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL ST TIPO 5 EQUIPO L
1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm

3006630272 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL ST TIPO 6 EQUIPO L
1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BRP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm
3006630273 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL SF TIPO 1 EQUIPO L
1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm
3006630274 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL SF TIPO 2 EQUIPO L
1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm
3006630275 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL SF TIPO 3 EQUIPO L
1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm
3006630276 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL SF TIPO 4 EQUIPO L
1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BRP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm
3006630277 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL SF TIPO 5 EQUIPO L
1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo 2 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm

<p>3006630278 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL SF TIPO 6 EQUIPO L</p> <p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BRP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630279 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL EP TIPO 1 EQUIPO L</p> <p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630280 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL EP TIPO 2 EQUIPO L</p> <p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>30066302781 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL EP TIPO 3 EQUIPO L</p> <p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630282 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL EP TIPO 4 EQUIPO L</p> <p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BRP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630283 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL EP TIPO 5 EQUIPO L</p> <p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>

<p>3006630284 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL EP TIPO 6 EQUIPO L</p> <p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BRP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630285 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL LV TIPO 1 EQUIPO L</p> <p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630286 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL LV TIPO 2 EQUIPO L</p> <p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630287 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL LV TIPO 3 EQUIPO L</p> <p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630288 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL LV TIPO 4 EQUIPO L</p> <p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação BRP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630289 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL LV TIPO 5 EQUIPO L</p> <p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>

<p>3006630290 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX DUAL LV TIPO 6 EQUIPO L</p> <p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação BRP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630291 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE RZ TIPO 1 EQUIPO L</p> <p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630292 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE RZ TIPO 2 EQUIPO L</p> <p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630293 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE RZ TIPO 3 EQUIPO L</p> <p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630294 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE RZ TIPO 4 EQUIPO L</p> <p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630295 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE ST TIPO 1 EQUIPO L</p>

<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630296 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE ST TIPO 2 EQUIPO L</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630297 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE ST TIPO 3 EQUIPO L</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630298 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE ST TIPO 4 EQUIPO L</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630299 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE SF TIPO 1 EQUIPO L</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630300 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE SF TIPO 2 EQUIPO L</p>

<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630301 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE SF TIPO 3 EQUIPO L</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630302 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE SF TIPO 4 EQUIPO L</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630303 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE EP TIPO 1 EQUIPO L</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630304 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE EP TIPO 2 EQUIPO L</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630305 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE EP TIPO 3 EQUIPO L</p>

<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630306 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE EP TIPO 4 EQUIPO L</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630307 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE LV TIPO 1 EQUIPO L</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630308 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE LV TIPO 2 EQUIPO L</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630309 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE LV TIPO 3 EQUIPO L</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630310 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE LV TIPO 4 EQUIPO L</p>

<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação BOP 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630311 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE COM RECOBRIMENTO RZ TIPO 1 EQUIPO L</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação com Recobrimento BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630312 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE COM RECOBRIMENTO RZ TIPO 2 EQUIPO L</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação com Recobrimento BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630313 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE COM RECOBRIMENTO RZ TIPO 3 EQUIPO L</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação com Recobrimento BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630314 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE COM RECOBRIMENTO ST TIPO 1 EQUIPO L</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação com Recobrimento BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>

<p>3006630315 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE COM RECOBRIMENTO ST TIPO 2 EQUIPO L</p> <p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação com Recobrimento BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630316 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE COM RECOBRIMENTO ST TIPO 3 EQUIPO L</p> <p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação com Recobrimento BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630317 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE COM RECOBRIMENTO SF TIPO 1 EQUIPO L</p> <p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação com Recobrimento BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630318 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE COM RECOBRIMENTO SF TIPO 2 EQUIPO L</p> <p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação com Recobrimento BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630319 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE COM RECOBRIMENTO SF TIPO 3 EQUIPO L</p>

<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação com Recobrimento BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630320 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE COM RECOBRIMENTO EP TIPO 1 EQUIPO L</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação com Recobrimento BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630321 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE COM RECOBRIMENTO EP TIPO 2 EQUIPO L</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação com Recobrimento BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630322 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE COM RECOBRIMENTO EP TIPO 3 EQUIPO L</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação com Recobrimento BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630323 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE COM RECOBRIMENTO LV TIPO 1 EQUIPO L</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação com Recobrimento BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>

3006630324 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE COM RECOBRIMENTO LV TIPO 2 EQUIPO L
1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridaçãõ BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridaçãõ BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridaçãõ com Recobrimento BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 Equipo para Bomba de irrigaçãõ de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm
3006630325 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE COM RECOBRIMENTO LV TIPO 3 EQUIPO L
1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridaçãõ BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridaçãõ BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridaçãõ com Recobrimento BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 Equipo para Bomba de irrigaçãõ de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm
3006630326 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE DLC RZ TIPO 1 EQUIPO L
1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridaçãõ BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridaçãõ com DLC BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridaçãõ BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 Equipo para Bomba de irrigaçãõ de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm
3006630327 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE DLC RZ TIPO 2 EQUIPO L
1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridaçãõ BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridaçãõ BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridaçãõ com DLC BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 Equipo para Bomba de irrigaçãõ de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm
3006630328 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE DLC RZ TIPO 3 EQUIPO L
1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridaçãõ BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridaçãõ BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridaçãõ com DLC BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 Equipo para Bomba de irrigaçãõ de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm

<p>3006630329 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE DLC ST TIPO 1 EQUIPO L</p> <p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação com DLC BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630330 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE DLC ST TIPO 2 EQUIPO L</p> <p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação com DLC BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630331 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE DLC ST TIPO 3 EQUIPO L</p> <p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação com DLC BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630332 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE DLC SF TIPO 1 EQUIPO L</p> <p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação com DLC BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630333 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE DLC SF TIPO 2 EQUIPO L</p> <p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação com DLC BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630334 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE DLC SF TIPO 3 EQUIPO L</p>

<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação com DLC BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630335 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE DLC EP TIPO 1 EQUIPO L</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação com DLC BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630336 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE DLC EP TIPO 2 EQUIPO L</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação com DLC BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630337 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE DLC EP TIPO 3 EQUIPO L</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação com DLC BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630338 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE DLC LV TIPO 1 EQUIPO L</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação com DLC BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630339 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE DLC LV TIPO 2 EQUIPO L</p>

<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação com DLC BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630340 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE DLC LV TIPO 3 EQUIPO L</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação com DLC BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630341 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE W RZ TIPO 1 EQUIPO L</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação com W BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630342 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE W RZ TIPO 2 EQUIPO L</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação com W BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630343 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE W RZ TIPO 3 EQUIPO L</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 CANULA DE Debridação com W BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm RZ 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630344 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE W ST TIPO 1 EQUIPO L</p>

<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação com W BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630345 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE W ST TIPO 2 EQUIPO L</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação com W BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630346 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE W ST TIPO 3 EQUIPO L</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 CANULA DE Debridação com W BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm ST 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630347 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE W SF TIPO 1 EQUIPO L</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação com W BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630348 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE W SF TIPO 2 EQUIPO L</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação com W BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630349 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE W SF TIPO 3 EQUIPO L</p>

<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 CANULA DE Debridação com W BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm SF 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630350 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE W EP TIPO 1 EQUIPO L</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação com W BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630351 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE W EP TIPO 2 EQUIPO L</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação com W BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630352 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE W EP TIPO 3 EQUIPO L</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 CANULA DE Debridação com W BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm EP 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630353 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE W LV TIPO 1 EQUIPO L</p>
<p>1 Cânula de Punção 18G x 200mm 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm 1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação com W BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L 1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm</p>
<p>3006630354 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE W LV TIPO 2 EQUIPO L</p>

1 Cânula de Punção 18G x 200mm
1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm
1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV
1 CANULA DE Debridação BD 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV
1 CANULA DE Debridação com W BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV
1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L
1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm

3006630355 - KIT CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX TRIPLE W LV TIPO 3 EQUIPO L

1 Cânula de Punção 18G x 200mm
1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm
1 CANULA DE Debridação BC 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV
1 CANULA DE Debridação BR 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV
1 CANULA DE Debridação com W BO 300 X 3,5 MM Ø 3,5 mm x 300 mm LV
1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias Tipo L
1 CANULA BIPOLAR PARA ENDOSCOPIA VERT-FLEX 2,8mm x 360mm

3. Tamanho do cabo de alimentação:

Em todos os modelos o cabo de alimentação que se conecta aos geradores eletrocirúrgicos são de 3m e foram desenvolvidos de modo que não seja possível conectá-lo a redes de alimentação domésticas.

4. Dados do fabricante

OSTEOMED S.A.

CNPJ: 00.638.390/0001-20

Rodovia Washington Luís, Km 172., Condomínio CONPARK – Rio Claro/SP

CEP: 13501-600, TEL +55 (19) 3522-3064

e-mail: regulatórios@osteomedimplantes.com

Responsável Técnico: Eng^o Fernando Argenton Neto CREA/SP 0605005234

5. Fundamentos de seu funcionamento e mecanismo de ação

O Kit Cânula para Endoscopia Vert-FLEX é utilizado em uma variedade de procedimentos minimamente invasivos que envolvem a inserção de um endoscópio através de pequenas incisões na pele. Esses kits são projetados para fornecer acesso e visualização direta de estruturas internas do corpo, permitindo a realização de diagnóstico, tratamento e intervenções terapêuticas.

Durante o procedimento de endoscopia percutânea, as cânulas de acesso são inseridas através da pele e dos tecidos até alcançar a área da coluna vertebral que requer tratamento. O endoscópio é então inserido através das cânulas, fornecendo visualização direta das estruturas da coluna vertebral.

Os instrumentos do kit são utilizados para interagir com os tecidos da coluna vertebral. Eles podem ser usados para remoção de hérnias de disco, descompressão de estruturas nervosas, estabilização vertebral, tratamento de fraturas ou para realizar biópsias ou ressecções de tumores.

O objetivo é interagir com os tecidos da coluna vertebral de forma precisa e controlada, minimizando o trauma aos tecidos saudáveis circundantes. O kit de endoscopia percutânea é projetado para fornecer acesso adequado e visão clara durante o procedimento, permitindo ao cirurgião realizar intervenções específicas no local afetado da coluna vertebral.

É importante que o kit de endoscopia percutânea seja utilizado por cirurgiões treinados e experientes, familiarizados com a anatomia da coluna vertebral e com as técnicas adequadas para interação com os tecidos da região.

No procedimento, o eletrodo bipolar pode ser usado para realizar coagulação ou cauterização de tecidos específicos. Esses eletrodos são inseridos através de um endoscópio e aplicam energia elétrica de baixa frequência para realizar o processo de coagulação.

O Kit Cânula para Endoscopia Vert-FLEX possui conexão com Equipamento Cirúrgicos de Alta Frequência (Acima de 50W), sendo os Bisturis Eletrônicos um equipamento cirúrgico de alta frequência que se destinam ao corte e à coagulação eletrocirúrgica de tecidos humanos vivos. Este objetivo é alcançado por meio da entrega de energia em alta frequência para o Eletrodo Bipolar.

6. Cuidados especiais durante transporte, armazenamento e manuseio.

- O local de armazenamento deve estar limpo, seco, arejado e com adequada iluminação de forma a manter a sua integridade física e química;
- O serviço de transporte contratado deve ser informado sobre o conteúdo e prazo da entrega. Os cuidados a serem tomados no transporte estão demonstrados na

caixa de papelão e na etiqueta de identificação, assegurando assim, proteção ao componente implantável desde a expedição até a entrega ao cliente.

- Deverá ser evitado durante o transporte: vibrações, choques, temperatura controlada (15°C – 40°C) e Umidade limite de (25% - 60%)
- Os componentes metálicos implantáveis devem ser manipulados com todo cuidado, de maneira a evitar choques bruscos, quedas e riscos e/ou imperfeições que afetem a qualidade dos mesmos e a segurança do usuário;
- A embalagem deve estar intacta no momento do recebimento.

7. Método de Esterilização

Os produtos contidos neste projeto são comercializados de forma estéril por ETO, sendo obrigatória a armazenagem dos componentes da prótese observadas as condições definidas na rotulagem antes de sua entrada ao centro cirúrgico. As condições de esterilização utilizadas foram validadas segundo a norma ABNT NBR ISO 11135-1 - Esterilização de produtos de atenção à saúde - Óxido de etileno - Parte 1: Requisitos para desenvolvimento, validação e controle de rotina de um processo de esterilização de produtos para saúde.

8. Formas de apresentação do produto médico;

O Produto é comercializado na forma estéril, em embalagens primárias e secundárias.

8.1. Rotulagem

A seguir um exemplo da etiqueta de identificação do produto (Figura 1). A etiqueta de identificação do produto contém as seguintes informações:

- (01) Componente (descrição);
- (02) Código componente (REF);
- (03) Lote (LOT);
- (04) Nº Ordem de fabricação (OF);
- (05) Material (Mat. Prima);
- (06) Quantidade;
- (07) Nº Registro ANVISA;

- (08) Data de fabricação;
- (09) Data de validade;
- (10) Nome comercial;
- (11) Nome Técnico;
- (12) Informação sobre condição de esterilização;
- (13) Simbologia informativa;
- (14) GS1 Data Matriz;
- (15) Local de disponibilização da instrução de uso eletrônica;
- (16) Responsável técnico.




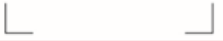
		OSTEOMED S. A. CNPJ: 00.638.390/0001-20		AFE: 800.719-1
RODOVIA WASHINGTON LUIZ (SP 310) KM 172 - PISTA SUL JARDIM ANHANGUERA CONDOMÍNIO CONPARK CEP: 13501-600 - RIO CLARO - SP - BRASIL TEL: +55(19)3522-3064				
01	COMPONENTE:			
02	03 REF	04 LOT	05 OF:	06 MAT. PRIMA:
				06 QUANTIDADE:
07	REGISTRO ANVISA Nº:		08 FABRICAÇÃO:	09 VALIDADE:
10	NOME COMERCIAL:			
11	NOME TÉCNICO:			
12	ESTERILIZAÇÃO: PRODUTO ESTÉRIL - ÓXIDO DE ETILENO PRODUTO DE USO ÚNICO - PROIBIDO REPROCESSAR			
13				
14				
15	Instrução de uso vigente conforme data de fabricação em: http://www.osteomedimplantes.com/instrucoes/ Se necessário, solicitar versão impressa no SAC: (19) 3522-3064			
16	INDICAÇÃO, ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO, MANIPULAÇÃO, ADVERTÊNCIA PRECAUÇÕES E ESTERILIZAÇÃO: VER INSTRUÇÕES DE USO RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGº FERNANDO ARGENTON NETO CREA/SP-060.500.532-4			
				

Figura 1 - Rótulo do Produto (imagem meramente ilustrativa).

Dentro de cada embalagem são colocadas 5 (cinco) etiquetas de identificação, com informações para rastreabilidade, conforme Resolução RDC nº 594, de 28 de dezembro de 2021 a qual solicita no mínimo 3 (três) etiquetas. Sendo, obrigatória a fixação:

- 1) No prontuário clínico do paciente;
- 2) No documento entregue para o paciente;

- 3) Na documentação fiscal que gera a cobrança, na AIH (Autorização de Internação Hospitalar), no caso de paciente atendido pelo SUS, ou na nota fiscal de venda, no caso de paciente atendido pelo sistema de saúde complementar;

Quanto as 2 etiquetas adicionais, recomenda-se:

- 4) Disponibilizar para o controle do fornecedor (registro histórico de distribuição – RHD);
- 5) Disponibilizar para o controle do cirurgião responsável (principal).

8.2. Embalagem

Os Implantes são acomodados em embalagem primária e secundária fabricadas em polímero PET, ambas seladas com membranas de Tyvek, dentro de uma caixa de papel couchê, com o logo da empresa. Embalagens desenvolvidas segundo norma ABNT NBR 15165 - Implantes ortopédicos – Requisitos gerais para marcação, embalagem e rotulagem.



Figura 2 - Embalagem em Polímero PET

Imagem ilustrativa.

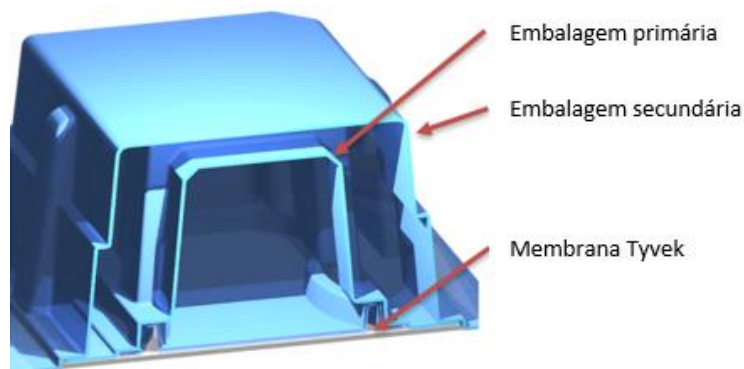


Imagem ilustrativa.

Figura 3 - Identificação das embalagens primárias e secundárias




Imagem ilustrativa.

Figura 4 - Caixa de Papel Cartão Especial.

8.3. Rastreabilidade

O produto possui número de lote e o sistema de vendas integrado ao sistema de qualidade possibilita o seu rastreamento e o destino final caso seja necessário.

- Logomarca - 
- Nome do Componente
- Matéria-Prima –S1 (Stainless Steel – Aço Inoxidável)
- Lote – letra L seguida por mais sete algarismos (ex: L.XXXXXXX)

A marcação é feita através do processo de gravação a LASER e segue conforme a NBR ISO 12932 – Implantes para Cirurgia – Materiais Metálicos – Preparação de superfície e Marcação seguindo, NBR ISO 14630– Implantes Cirúrgicos não ativos – Requisitos

Gerais e NBR 15165 - Implantes ortopédicos – Requisitos gerais para marcação, embalagem e rotulagem.

9. Instrução de Uso

Conforme descrito no artigo 50 da RDC Nº 751, de 15 de setembro de 2022, as instruções de uso em formato não impresso poderão ser fornecidas em mídias físicas ou disponibilizadas na Internet ou em outro formato que contemple todas as exigências desta Resolução. Portanto, o fabricante disponibiliza a instrução de uso por meio de seu site, disponível em: https://osteomedimplantes.com/instrucoes_de_uso

10. ADVERTÊNCIAS

Advertências Gerais

- ✓ Antes de utilizar o produto certifique-se de ler e compreender as instruções fornecidas nas instruções de uso.
- ✓ Este produto somente pode ser utilizado sob prescrição médica ou suas supervisão.
- ✓ O cirurgião deve estar ciente das técnicas cirúrgicas.
- ✓ O uso correto do produto é extremamente importante para o sucesso na utilização.

Advertência associada à verificação do estado superficial do produto que restrinja o seu uso.

- ✓ Caso haja alguma discrepância na aparência visual (como a quebra parcial) ou mesmo algum foco do material apresente outra coloração, não utilize produto e entre em contato imediatamente com o fabricante ou distribuidor do produto.

Identificação da possibilidade de reesterilização
PROIBIDO REPROCESSAR!!

Cuidados especiais

- ✓ Somente profissionais habilitados e com conhecimento dos procedimentos necessários para escolha, aplicação e utilização adequadas do produto deverão fazer uso do mesmo.
- ✓ O uso do produto com procedimentos e condições não adequadas poderá prejudicar o paciente conduzindo a resultados não satisfatórios.
- ✓ O médico deverá checar a integridade e o prazo de validade da embalagem.

Procedimentos relacionados ao descarte:

Procedimentos relacionados a descarte de produto desqualificado, de forma a assegurar sua inutilização para que não seja indevidamente reaproveitado:

- ✓ Descarte e não use o produto fora do prazo de validade e/ou previamente abertos ou danificados, o que acarretará perda da esterilidade.
- ✓ Recomenda-se que o produto seja descartado no lixo hospitalar (conforme as normas da autoridade sanitária local).
- ✓ Para os itens que forem removidas da embalagem e inseridas dentro do ambiente cirúrgico, mesmo que não tenham sido utilizadas ou que tenham sido contaminadas por outras fontes, a reesterilização para uso não garante o desempenho atribuído ao produto, sendo de inteira responsabilidade do usuário. Convém então que o produto seja descartado no lixo hospitalar conforme as normas da autoridade sanitária local.
- ✓ O descarte deve ser realizado seguindo-se as disposições da Resolução RDC Nº 222/2018 que dispõe sobre o Regulamento Técnico para gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, bem como outras práticas de biossegurança equivalentes.



Osteomed S.A.

Rodovia Washington Luís, Km 172.
Condomínio CONPARK – Rio Claro/SP
CEP: 13501-600, +55(19) 3522-3064
CNPJ: 00.638.390/0001-20
www.osteomedimplantes.com



OSTEOMED S.A.

Rodovia Washington Luís (SP 310), Pista Sul, Km 172 – Rua 6 S/N - Jd Anhanguera -
Condomínio Conpark Rua 6 S/N Rio Claro SP - CEP 13.501- 600
Tel. (19) 3522-3064 - E-mail: administrativo@osteomedimplantes.com
MS 800719-1/Registro ANVISA nº**80071910122**
Tec. Resp.: Engº Fernando Argenton Neto – CREA 060.500.523.4