



Osteomed S.A.
Rodovia Washington Luís, Km 172.
Condomínio CONPARK – Rio Claro/SP
CEP: 13501-600, +55(19) 3522-3064
CNPJ: 00.638.390/0001-20
www.osteomedimplantes.com

INSTRUÇÕES DE USO

Revisão IU: 02

Data: 10/04/2026

PRODUTO: Sistema de Fixação Pedicular Minimamente Invasivo – MINI-OSTEO

NOME TÉCNICO: Sistemas Internos de Fixação de Coluna Vertebral

MATÉRIA PRIMA: Liga de Titânio Ti6Al4V Grau 23 ELI (ASTM F136) e Titânio Puro (ASTM F67).

PRODUTO NÃO ESTÉRIL

MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: Autoclave

VALIDADE: Indeterminado

PRODUTO MÉDICO DE USO ÚNICO – PROIBIDO REPROCESSAR

Classificação conforme RDC 751 de 15 de setembro de 2022

Natureza do material: metálico e não absorvível

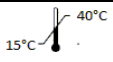
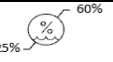
Constituição: Mono componente

Forma de Fixação: Rígido (O Sistema é utilizado por meio de intervenção cirúrgica realizada com a finalidade de suprimir totalmente a mobilidade de uma ou mais vértebras (artrodese), constituindo-se um Sistema Rígido.)

Modularidade: Modular

A simbologia presente na etiqueta, representada através de números é explicada na Tabela 1. A simbologia conforme Norma ISO 15223-1- *Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied -- Part 1: General requirements*

Tabela 1 - Explicação sobre a simbologia da etiqueta.

Símbolo	Descrição	Símbolo	Descrição
	Lote		Código do componente
	Data de fabricação		Data de validade
	Dados da empresa		Não usar se a embalagem estiver danificada
	Indicação de produto de uso único – não reutilizar		Proteger da luz solar
	Apresentação de informações adicionais – consulta do manual de uso		Proteger da água
	Armazenar em temperatura controlada (15°C – 40°C)		Umidade limite para armazenamento (25% - 60%)
	Indicação de produto estéril		Indicação de produto não estéril
	(MR Conditional) Condiciona para RM		

1. Descrição do dispositivo médico

O **Sistema de Fixação Pedicular Minimamente Invasivo - MINI-OSTEO** é um conjunto de componentes metálicos implantáveis (produto médico), complementares e compatíveis entre si, de concepção modular, anatômico ao osso, desenvolvido para a aplicação em cirurgia da coluna torácica, lombar e sacral tendo a finalidade de auxiliar na fixação, estabilização e correção até que haja a fusão óssea no local (artrodese), de acordo com a indicação de uso. O produto é caracterizado como sendo um sistema aberto, onde todos os componentes metálicos implantáveis são fornecidos e comercializados separadamente. O acabamento superficial dos componentes é obtido através do processo de tamboreamento.

O produto Sistema de Fixação Pedicular Minimamente Invasivo – MINI-OSTEO é composto dos seguintes componentes:

Código	Componente
30.037.00001	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 5,5 X 35,0 MM

30.037.00002	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 5,5 X 40,0 MM
30.037.00003	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 5,5 X 45,0 MM
30.037.00004	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 5,5 X 50,0 MM
30.037.00005	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 5,5 X 55,0 MM
30.037.00006	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 5,5 X 60,0 MM
30.037.01001	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 6,0 X 35,0 MM
30.037.01002	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 6,0 X 40,0 MM
30.037.01003	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 6,0 X 45,0 MM
30.037.01004	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 6,0 X 50,0 MM
30.037.01005	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 6,0 X 55,0 MM
30.037.01006	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 6,0 X 60,0 MM
30.037.02001	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 6,5 X 35,0 MM
30.037.02002	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 6,5 X 40,0 MM
30.037.02003	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 6,5 X 45,0 MM
30.037.02004	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 6,5 X 50,0 MM
30.037.02005	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 6,5 X 55,0 MM
30.037.02006	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 6,5 X 60,0 MM
30.037.03001	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 7,0 X 35,0 MM
30.037.03002	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 7,0 X 40,0 MM
30.037.03003	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 7,0 X 45,0 MM
30.037.03004	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 7,0 X 50,0 MM
30.037.03005	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 7,0 X 55,0 MM
30.037.03006	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 7,0 X 60,0 MM
30.037.04001	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 7,5 X 35,0 MM
30.037.04002	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 7,5 X 40,0 MM

30.037.04003	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 7,5 X 45,0 MM
30.037.04004	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 7,5 X 50,0 MM
30.037.04005	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 7,5 X 55,0 MM
30.037.04006	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 7,5 X 60,0 MM
30.037.05001	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 8,0 X 35,0 MM
30.037.05002	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 8,0 X 40,0 MM
30.037.05003	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 8,0 X 45,0 MM
30.037.05004	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 8,0 X 50,0 MM
30.037.05005	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 8,0 X 55,0 MM
30.037.05006	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 8,0 X 60,0 MM
30.037.05007	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 8,0 X 65,0 MM
30.037.05008	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 8,0 X 70,0 MM
30.037.05009	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 8,0 X 75,0 MM
30.037.05010	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 8,0 X 80,0 MM
30.037.05011	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 8,0 X 85,0 MM
30.037.05012	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 8,0 X 90,0 MM
30.037.05013	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 8,0 X 95,0 MM
30.037.05014	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 8,0 X 100,0 MM
30.037.06001	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 8,5 X 35,0 MM
30.037.06002	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 8,5 X 40,0 MM
30.037.06003	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 8,5 X 45,0 MM
30.037.06004	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 8,5 X 50,0 MM
30.037.06005	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 8,5 X 55,0 MM
30.037.06006	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 8,5 X 60,0 MM
30.037.06007	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 8,5 X 65,0 MM
30.037.06008	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 8,5 X 70,0 MM

30.037.06009	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 8,5 X 75,0 MM
30.037.06010	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 8,5 X 80,0 MM
30.037.06011	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 8,5 X 85,0 MM
30.037.06012	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 8,5 X 90,0 MM
30.037.06013	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 8,5 X 95,0 MM
30.037.06014	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 8,5 X 100,0 MM
30.037.07001	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 9,0 X 35,0 MM
30.037.07002	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 9,0 X 40,0 MM
30.037.07003	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 9,0 X 45,0 MM
30.037.07004	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 9,0 X 50,0 MM
30.037.07005	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 9,0 X 55,0 MM
30.037.07006	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 9,0 X 60,0 MM
30.037.07007	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 9,0 X 65,0 MM
30.037.07008	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 9,0 X 70,0 MM
30.037.07009	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 9,0 X 75,0 MM
30.037.07010	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 9,0 X 80,0 MM
30.037.07011	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 9,0 X 85,0 MM
30.037.07012	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 9,0 X 90,0 MM
30.037.07013	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 9,0 X 95,0 MM
30.037.07014	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 9,0 X 100,0 MM
30.037.10001	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 5,5 X 35,0 MM
30.037.10002	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 5,5 X 40,0 MM
30.037.10003	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 5,5 X 45,0 MM
30.037.10004	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 5,5 X 50,0 MM
30.037.10005	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 5,5 X 55,0 MM
30.037.10006	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 5,5 X 60,0 MM

30.037.11001	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 6,0 X 35,0 MM
30.037.11002	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 6,0 X 40,0 MM
30.037.11003	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 6,0 X 45,0 MM
30.037.11004	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 6,0 X 50,0 MM
30.037.11005	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 6,0 X 55,0 MM
30.037.11006	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 6,0 X 60,0 MM
30.037.12001	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 6,5 X 35,0 MM
30.037.12002	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 6,5 X 40,0 MM
30.037.12003	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 6,5 X 45,0 MM
30.037.12004	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 6,5 X 50,0 MM
30.037.12005	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 6,5 X 55,0 MM
30.037.12006	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 6,5 X 60,0 MM
30.037.13001	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 7,0 X 35,0 MM
30.037.13002	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 7,0 X 40,0 MM
30.037.13003	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 7,0 X 45,0 MM
30.037.13004	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 7,0 X 50,0 MM
30.037.13005	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 7,0 X 55,0 MM
30.037.13006	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 7,0 X 60,0 MM
30.037.14001	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 7,5 X 35,0 MM
30.037.14002	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 7,5 X 40,0 MM
30.037.14003	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 7,5 X 45,0 MM
30.037.14004	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 7,5 X 50,0 MM
30.037.14005	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 7,5 X 55,0 MM
30.037.14006	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 7,5 X 60,0 MM
Código	Componente

30.037.40001	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 5,5 X 35,0 MM
30.037.40002	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 5,5 X 40,0 MM
30.037.40003	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 5,5 X 45,0 MM
30.037.40004	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 5,5 X 50,0 MM
30.037.40005	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 5,5 X 55,0 MM
30.037.40006	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 5,5 X 60,0 MM
30.037.41001	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 6,0 X 35,0 MM
30.037.41002	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 6,0 X 40,0 MM
30.037.41003	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 6,0 X 45,0 MM
30.037.41004	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 6,0 X 50,0 MM
30.037.41005	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 6,0 X 55,0 MM
30.037.41006	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 6,0 X 60,0 MM
30.037.42001	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 6,5 X 35,0 MM
30.037.42002	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 6,5 X 40,0 MM
30.037.42003	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 6,5 X 45,0 MM
30.037.42004	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 6,5 X 50,0 MM
30.037.42005	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 6,5 X 55,0 MM
30.037.42006	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 6,5 X 60,0 MM
30.037.43001	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 7,0 X 35,0 MM
30.037.43002	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 7,0 X 40,0 MM
30.037.43003	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 7,0 X 45,0 MM
30.037.43004	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 7,0 X 50,0 MM
30.037.43005	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 7,0 X 55,0 MM
30.037.43006	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 7,0 X 60,0 MM
30.037.43007	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 7,0 X 65,0 MM

30.037.43008	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 7,0 X 70,0 MM
30.037.43009	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 7,0 X 75,0 MM
30.037.43010	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 7,0 X 80,0 MM
30.037.44001	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 7,5 X 35,0 MM
30.037.44002	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 7,5 X 40,0 MM
30.037.44003	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 7,5 X 45,0 MM
30.037.44004	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 7,5 X 50,0 MM
30.037.44005	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 7,5 X 55,0 MM
30.037.44006	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 7,5 X 60,0 MM
30.037.44007	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 7,5 X 65,0 MM
30.037.44008	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 7,5 X 70,0 MM
30.037.44009	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 7,5 X 75,0 MM
30.037.44010	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 7,5 X 80,0 MM
30.037.49001	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 8,0 X 35,0 MM
30.037.49002	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 8,0 X 40,0 MM
30.037.49003	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 8,0 X 45,0 MM
30.037.49004	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 8,0 X 50,0 MM
30.037.49005	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 8,0 X 55,0 MM
30.037.49006	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 8,0 X 60,0 MM
30.037.49007	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 8,0 X 65,0 MM
30.037.49008	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 8,0 X 70,0 MM
30.037.49009	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 8,0 X 75,0 MM
30.037.49010	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 8,0 X 80,0 MM
30.037.49011	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 8,0 X 85,0 MM
30.037.49012	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 8,0 X 90,0 MM
30.037.49013	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 8,0 X 95,0 MM

30.037.49014	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 8,0 X 100,0 MM
30.037.49201	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 8,5 X 35,0 MM
30.037.49202	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 8,5 X 40,0 MM
30.037.49203	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 8,5 X 45,0 MM
30.037.49204	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 8,5 X 50,0 MM
30.037.49205	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 8,5 X 55,0 MM
30.037.49206	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 8,5 X 60,0 MM
30.037.49207	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 8,5 X 65,0 MM
30.037.49208	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 8,5 X 70,0 MM
30.037.49209	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 8,5 X 75,0 MM
30.037.49210	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 8,5 X 80,0 MM
30.037.49211	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 8,5 X 85,0 MM
30.037.49212	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 8,5 X 90,0 MM
30.037.49213	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 8,5 X 95,0 MM
30.037.49214	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 8,5 X 100,0 MM
30.037.49101	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 9,0 X 35,0 MM
30.037.49102	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 9,0 X 40,0 MM
30.037.49103	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 9,0 X 45,0 MM
30.037.49104	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 9,0 X 50,0 MM
30.037.49105	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 9,0 X 55,0 MM
30.037.49106	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 9,0 X 60,0 MM
30.037.49107	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 9,0 X 65,0 MM
30.037.49108	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 9,0 X 70,0 MM
30.037.49109	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 9,0 X 75,0 MM
30.037.49110	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 9,0 X 80,0 MM
30.037.49111	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 9,0 X 85,0 MM

30.037.49112	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 9,0 X 90,0 MM
30.037.49113	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 9,0 X 95,0 MM
30.037.49114	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 9,0 X 100,0 MM
30.037.46001	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 3,5 X 20,0 MM
30.037.46002	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 3,5 X 25,0 MM
30.037.46003	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 3,5 X 30,0 MM
30.037.46004	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 3,5 X 35,0 MM
30.037.47001	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 4,0 X 20,0 MM
30.037.47002	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 4,0 X 25,0 MM
30.037.47003	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 4,0 X 30,0 MM
30.037.47004	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 4,0 X 35,0 MM
30.037.47005	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 4,0 X 40,0 MM
30.037.48001	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 4,5 X 20,0 MM
30.037.48002	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 4,5 X 25,0 MM
30.037.48003	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 4,5 X 30,0 MM
30.037.48004	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 4,5 X 35,0 MM
30.037.48005	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 4,5 X 40,0 MM
30.037.48006	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 4,5 X 45,0 MM
30.037.48007	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 4,5 X 50,0 MM
30.037.45001	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 5,0 X 30,0 MM
30.037.45002	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 5,0 X 35,0 MM
30.037.45003	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 5,0 X 40,0 MM
30.037.45004	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 5,0 X 45,0 MM
30.037.45005	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 5,0 X 50,0 MM
30.037.45006	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 5,0 X 55,0 MM

30.037.45007	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 5,0 X 60,0 MM
30.037.30001	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 5,5 X 35,0 MM
30.037.30002	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 5,5 X 40,0 MM
30.037.30003	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 5,5 X 45,0 MM
30.037.30004	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 5,5 X 50,0 MM
30.037.30005	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 5,5 X 55,0 MM
30.037.30006	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 5,5 X 60,0 MM
30.037.31000	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 6,0 X 30,0 MM
30.037.31001	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 6,0 X 35,0 MM
30.037.31002	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 6,0 X 40,0 MM
30.037.31003	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 6,0 X 45,0 MM
30.037.31004	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 6,0 X 50,0 MM
30.037.31005	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 6,0 X 55,0 MM
30.037.31006	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 6,0 X 60,0 MM
30.037.32001	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 6,5 X 35,0 MM
30.037.32002	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 6,5 X 40,0 MM
30.037.32003	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 6,5 X 45,0 MM
30.037.32004	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 6,5 X 50,0 MM
30.037.32005	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 6,5 X 55,0 MM
30.037.32006	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 6,5 X 60,0 MM
30.037.33000	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 7,0 X 30,0 MM
30.037.33001	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 7,0 X 35,0 MM
30.037.33002	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 7,0 X 40,0 MM
30.037.33003	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 7,0 X 45,0 MM

30.037.33004	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 7,0 X 50,0 MM
30.037.33005	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 7,0 X 55,0 MM
30.037.33006	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 7,0 X 60,0 MM
30.037.33007	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 7,0 X 65,0 MM
30.037.33008	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 7,0 X 70,0 MM
30.037.33009	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 7,0 X 75,0 MM
30.037.33010	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 7,0 X 80,0 MM
30.037.34001	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 7,5 X 35,0 MM
30.037.34002	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 7,5 X 40,0 MM
30.037.34003	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 7,5 X 45,0 MM
30.037.34004	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 7,5 X 50,0 MM
30.037.34005	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 7,5 X 55,0 MM
30.037.34006	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 7,5 X 60,0 MM
30.037.34007	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 7,5 X 65,0 MM
30.037.34008	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 7,5 X 70,0 MM
30.037.34009	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 7,5 X 75,0 MM
30.037.34010	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 7,5 X 80,0 MM
30.037.35001	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 3,5 X 12,0 MM
30.037.35002	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 3,5 X 14,0 MM
30.037.35003	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 3,5 X 16,0 MM
30.037.35004	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 3,5 X 18,0 MM
30.037.35005	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 3,5 X 20,0 MM
30.037.35006	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 3,5 X 25,0 MM
30.037.35007	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 3,5 X 30,0 MM
30.037.35008	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 3,5 X 35,0 MM
30.037.35009	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 3,5 X 40,0 MM

30.037.36001	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 4,0 X 12,0 MM
30.037.36002	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 4,0 X 14,0 MM
30.037.36003	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 4,0 X 16,0 MM
30.037.36004	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 4,0 X 18,0 MM
30.037.36005	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 4,0 X 20,0 MM
30.037.36006	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 4,0 X 25,0 MM
30.037.36007	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 4,0 X 30,0 MM
30.037.36008	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 4,0 X 35,0 MM
30.037.36009	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 4,0 X 40,0 MM
30.037.36010	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 4,0 X 45,0 MM
30.037.36011	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 4,0 X 50,0 MM
30.037.36012	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 4,0 X 55,0 MM
30.037.37001	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 4,5 X 20,0 MM
30.037.37002	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 4,5 X 25,0 MM
30.037.37003	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 4,5 X 30,0 MM
30.037.37004	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 4,5 X 35,0 MM
30.037.37005	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 4,5 X 40,0 MM
30.037.37006	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 4,5 X 45,0 MM
30.037.37007	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 4,5 X 50,0 MM
30.037.37008	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 4,5 X 55,0 MM
30.037.38001	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 5,0 X 20,0 MM
30.037.38002	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 5,0 X 25,0 MM
30.037.38003	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 5,0 X 30,0 MM
30.037.38004	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 5,0 X 35,0 MM
30.037.38005	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 5,0 X 40,0 MM

30.037.38006	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 5,0 X 45,0 MM
30.037.38007	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 5,0 X 50,0 MM
30.037.38008	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 5,0 X 55,0 MM
30.037.51001	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 5,5 X 35,0 MM
30.037.51002	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 5,5 X 40,0 MM
30.037.51003	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 5,5 X 45,0 MM
30.037.51004	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 5,5 X 50,0 MM
30.037.51005	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 5,5 X 55,0 MM
30.037.51006	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 5,5 X 60,0 MM
30.037.52001	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 6,0 X 35,0 MM
30.037.52002	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 6,0 X 40,0 MM
30.037.52003	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 6,0 X 45,0 MM
30.037.52004	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 6,0 X 50,0 MM
30.037.52005	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 6,0 X 55,0 MM
30.037.52006	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 6,0 X 60,0 MM
30.037.53001	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 6,5 X 35,0 MM
30.037.53002	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 6,5 X 40,0 MM
30.037.53003	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 6,5 X 45,0 MM
30.037.53004	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 6,5 X 50,0 MM
30.037.53005	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 6,5 X 55,0 MM
30.037.53006	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 6,5 X 60,0 MM
30.037.54001	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 7,0 X 35,0 MM
30.037.54002	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 7,0 X 40,0 MM
30.037.54003	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 7,0 X 45,0 MM

30.037.54004	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 7,0 X 50,0 MM
30.037.54005	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 7,0 X 55,0 MM
30.037.54006	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 7,0 X 60,0 MM
30.037.55001	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 7,5 X 35,0 MM
30.037.55002	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 7,5 X 40,0 MM
30.037.55003	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 7,5 X 45,0 MM
30.037.55004	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 7,5 X 50,0 MM
30.037.55005	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 7,5 X 55,0 MM
30.037.55006	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 7,5 X 60,0 MM
30.037.56001	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 8,0 X 35,0 MM
30.037.56002	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 8,0 X 40,0 MM
30.037.56003	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 8,0 X 45,0 MM
30.037.56004	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 8,0 X 50,0 MM
30.037.56005	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 8,0 X 55,0 MM
30.037.56006	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 8,0 X 60,0 MM
30.037.56007	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 8,0 X 65,0 MM
30.037.56008	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 8,0 X 70,0 MM
30.037.56009	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 8,0 X 75,0 MM
30.037.56010	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 8,0 X 80,0 MM
30.037.56011	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 8,0 X 85,0 MM
30.037.56012	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 8,0 X 90,0 MM
30.037.56013	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 8,0 X 95,0 MM
30.037.56014	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 8,0 X 100,0 MM
30.037.57001	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 8,5 X 35,0 MM
30.037.57002	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 8,5 X 40,0 MM

30.037.57003	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 8,5 X 45,0 MM
30.037.57004	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 8,5 X 50,0 MM
30.037.57005	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 8,5 X 55,0 MM
30.037.57006	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 8,5 X 60,0 MM
30.037.57007	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 8,5 X 65,0 MM
30.037.57008	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 8,5 X 70,0 MM
30.037.57009	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 8,5 X 75,0 MM
30.037.57010	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 8,5 X 80,0 MM
30.037.57011	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 8,5 X 85,0 MM
30.037.57012	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 8,5 X 90,0 MM
30.037.57013	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 8,5 X 95,0 MM
30.037.57014	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 8,5 X 100,0 MM
30.037.58001	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 9,0 X 35,0 MM
30.037.58002	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 9,0 X 40,0 MM
30.037.58003	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 9,0 X 45,0 MM
30.037.58004	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 9,0 X 50,0 MM
30.037.58005	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 9,0 X 55,0 MM
30.037.58006	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 9,0 X 60,0 MM
30.037.58007	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 9,0 X 65,0 MM
30.037.58008	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 9,0 X 70,0 MM
30.037.58009	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 9,0 X 75,0 MM
30.037.58010	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 9,0 X 80,0 MM
30.037.58011	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 9,0 X 85,0 MM
30.037.58012	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 9,0 X 90,0 MM
30.037.58013	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 9,0 X 95,0 MM
30.037.58014	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 9,0 X 100,0 MM

30.037.61001	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 5,5 X 35,0 MM
30.037.61002	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 5,5 X 40,0 MM
30.037.61003	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 5,5 X 45,0 MM
30.037.61004	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 5,5 X 50,0 MM
30.037.61005	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 5,5 X 55,0 MM
30.037.61006	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 5,5 X 60,0 MM
30.037.62001	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 6,0 X 35,0 MM
30.037.62002	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 6,0 X 40,0 MM
30.037.62003	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 6,0 X 45,0 MM
30.037.62004	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 6,0 X 50,0 MM
30.037.62005	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 6,0 X 55,0 MM
30.037.62006	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 6,0 X 60,0 MM
30.037.63001	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 6,5 X 35,0 MM
30.037.63002	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 6,5 X 40,0 MM
30.037.63003	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 6,5 X 45,0 MM
30.037.63004	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 6,5 X 50,0 MM
30.037.63005	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 6,5 X 55,0 MM
30.037.63006	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 6,5 X 60,0 MM
30.037.64001	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 7,0 X 35,0 MM
30.037.64002	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 7,0 X 40,0 MM
30.037.64003	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 7,0 X 45,0 MM
30.037.64004	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 7,0 X 50,0 MM
30.037.64005	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 7,0 X 55,0 MM
30.037.64006	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 7,0 X 60,0 MM
30.037.65001	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 7,5 X 35,0 MM

30.037.65002	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 7,5 X 40,0 MM
30.037.65003	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 7,5 X 45,0 MM
30.037.65004	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 7,5 X 50,0 MM
30.037.65005	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 7,5 X 55,0 MM
30.037.65006	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 7,5 X 60,0 MM
30.037.75001	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 5,5 X 35,0 MM
30.037.75002	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 5,5 X 40,0 MM
30.037.75003	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 5,5 X 45,0 MM
30.037.75004	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 5,5 X 50,0 MM
30.037.75005	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 5,5 X 55,0 MM
30.037.75006	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 5,5 X 60,0 MM
30.037.76001	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 6,0 X 35,0 MM
30.037.76002	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 6,0 X 40,0 MM
30.037.76003	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 6,0 X 45,0 MM
30.037.76004	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 6,0 X 50,0 MM
30.037.76005	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 6,0 X 55,0 MM
30.037.76006	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 6,0 X 60,0 MM
30.037.77001	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 6,5 X 35,0 MM
30.037.77002	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 6,5 X 40,0 MM
30.037.77003	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 6,5 X 45,0 MM
30.037.77004	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 6,5 X 50,0 MM
30.037.77005	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 6,5 X 55,0 MM
30.037.77006	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 6,5 X 60,0 MM
30.037.78001	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 7,0 X 35,0 MM

30.037.78002	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 7,0 X 40,0 MM
30.037.78003	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 7,0 X 45,0 MM
30.037.78004	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 7,0 X 50,0 MM
30.037.78005	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 7,0 X 55,0 MM
30.037.78006	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 7,0 X 60,0 MM
30.037.78007	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 7,0 X 65,0 MM
30.037.78008	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 7,0 X 70,0 MM
30.037.78009	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 7,0 X 75,0 MM
30.037.78010	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 7,0 X 80,0 MM
30.037.78011	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 7,0 X 85,0 MM
30.037.78012	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 7,0 X 90,0 MM
30.037.78013	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 7,0 X 95,0 MM
30.037.78014	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 7,0 X 100,0 MM
30.037.79001	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 7,5 X 35,0 MM
30.037.79002	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 7,5 X 40,0 MM
30.037.79003	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 7,5 X 45,0 MM
30.037.79004	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 7,5 X 50,0 MM
30.037.79005	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 7,5 X 55,0 MM
30.037.79006	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 7,5 X 60,0 MM
30.037.79007	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 7,5 X 65,0 MM
30.037.79008	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 7,5 X 70,0 MM
30.037.79009	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 7,5 X 75,0 MM
30.037.79010	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 7,5 X 80,0 MM
30.037.79011	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 7,5 X 85,0 MM
30.037.79012	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 7,5 X 90,0 MM
30.037.79013	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 7,5 X 95,0 MM
30.037.79014	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 7,5 X 100,0 MM

30.037.80001	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 8,0 X 35,0 MM
30.037.80002	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 8,0 X 40,0 MM
30.037.80003	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 8,0 X 45,0 MM
30.037.80004	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 8,0 X 50,0 MM
30.037.80005	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 8,0 X 55,0 MM
30.037.80006	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 8,0 X 60,0 MM
30.037.80007	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 8,0 X 65,0 MM
30.037.80008	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 8,0 X 70,0 MM
30.037.80009	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 8,0 X 75,0 MM
30.037.80010	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 8,0 X 80,0 MM
30.037.80011	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 8,0 X 85,0 MM
30.037.80012	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 8,0 X 90,0 MM
30.037.80013	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 8,0 X 95,0 MM
30.037.80014	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 8,0 X 100,0 MM
30.037.81001	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 8,5 X 35,0 MM
30.037.81002	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 8,5 X 40,0 MM
30.037.81003	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 8,5 X 45,0 MM
30.037.81004	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 8,5 X 50,0 MM
30.037.81005	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 8,5 X 55,0 MM
30.037.81006	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 8,5 X 60,0 MM
30.037.81007	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 8,5 X 65,0 MM
30.037.81008	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 8,5 X 70,0 MM
30.037.81009	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 8,5 X 75,0 MM
30.037.81010	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 8,5 X 80,0 MM
30.037.81011	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 8,5 X 85,0 MM
30.037.81012	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 8,5 X 90,0 MM

30.037.81013	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 8,5 X 95,0 MM
30.037.81014	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 8,5 X 100,0 MM
30.037.82001	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 9,0 X 35,0 MM
30.037.82002	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 9,0 X 40,0 MM
30.037.82003	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 9,0 X 45,0 MM
30.037.82004	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 9,0 X 50,0 MM
30.037.82005	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 9,0 X 55,0 MM
30.037.82006	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 9,0 X 60,0 MM
30.037.82007	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 9,0 X 65,0 MM
30.037.82008	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 9,0 X 70,0 MM
30.037.82009	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 9,0 X 75,0 MM
30.037.82010	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 9,0 X 80,0 MM
30.037.82011	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 9,0 X 85,0 MM
30.037.82012	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 9,0 X 90,0 MM
30.037.82013	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 9,0 X 95,0 MM
30.037.82014	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 9,0 X 100,0 MM
30.037.71001	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 3,5 X 20,0 MM
30.037.71002	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 3,5 X 25,0 MM
30.037.71003	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 3,5 X 30,0 MM
30.037.71004	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 3,5 X 35,0 MM
30.037.72001	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 4,0 X 20,0 MM
30.037.72002	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 4,0 X 25,0 MM
30.037.72003	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 4,0 X 30,0 MM
30.037.72004	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 4,0 X 35,0 MM
30.037.72005	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 4,0 X 40,0 MM

30.037.73001	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 4,5 X 20,0 MM
30.037.73002	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 4,5 X 25,0 MM
30.037.73003	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 4,5 X 30,0 MM
30.037.73004	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 4,5 X 35,0 MM
30.037.73005	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 4,5 X 40,0 MM
30.037.73006	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 4,5 X 45,0 MM
30.037.73007	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 4,5 X 50,0 MM
30.037.74001	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 5,0 X 30,0 MM
30.037.74002	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 5,0 X 35,0 MM
30.037.74003	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 5,0 X 40,0 MM
30.037.74004	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 5,0 X 45,0 MM
30.037.74005	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 5,0 X 50,0 MM
30.037.74006	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 5,0 X 55,0 MM
30.037.74007	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 5,0 X 60,0 MM
30.037.87001	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 5,5 X 35,0 MM
30.037.87002	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 5,5 X 40,0 MM
30.037.87003	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 5,5 X 45,0 MM
30.037.87004	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 5,5 X 50,0 MM
30.037.87005	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 5,5 X 55,0 MM
30.037.87006	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 5,5 X 60,0 MM
30.037.88001	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 6,0 X 35,0 MM
30.037.88002	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 6,0 X 40,0 MM
30.037.88003	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 6,0 X 45,0 MM
30.037.88004	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 6,0 X 50,0 MM
30.037.88005	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 6,0 X 55,0 MM

30.037.88006	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 6,0 X 60,0 MM
30.037.89001	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 6,5 X 35,0 MM
30.037.89002	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 6,5 X 40,0 MM
30.037.89003	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 6,5 X 45,0 MM
30.037.89004	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 6,5 X 50,0 MM
30.037.89005	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 6,5 X 55,0 MM
30.037.89006	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 6,5 X 60,0 MM
30.037.90001	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 7,0 X 35,0 MM
30.037.90002	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 7,0 X 40,0 MM
30.037.90003	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 7,0 X 45,0 MM
30.037.90004	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 7,0 X 50,0 MM
30.037.90005	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 7,0 X 55,0 MM
30.037.90006	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 7,0 X 60,0 MM
30.037.91001	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 7,5 X 35,0 MM
30.037.91002	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 7,5 X 40,0 MM
30.037.91003	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 7,5 X 45,0 MM
30.037.91004	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 7,5 X 50,0 MM
30.037.91005	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 7,5 X 55,0 MM
30.037.91006	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 7,5 X 60,0 MM
30.037.83001	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 3,5 X 12,0 MM
30.037.83002	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 3,5 X 14,0 MM
30.037.83003	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 3,5 X 16,0 MM
30.037.83004	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 3,5 X 18,0 MM
30.037.83005	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 3,5 X 20,0 MM
30.037.83006	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 3,5 X 25,0 MM

30.037.83007	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 3,5 X 30,0 MM
30.037.83008	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 3,5 X 35,0 MM
30.037.83009	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 3,5 X 40,0 MM
30.037.84001	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 4,0 X 12,0 MM
30.037.84002	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 4,0 X 14,0 MM
30.037.84003	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 4,0 X 16,0 MM
30.037.84004	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 4,0 X 18,0 MM
30.037.84005	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 4,0 X 20,0 MM
30.037.84006	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 4,0 X 25,0 MM
30.037.84007	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 4,0 X 30,0 MM
30.037.84008	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 4,0 X 35,0 MM
30.037.84009	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 4,0 X 40,0 MM
30.037.84010	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 4,0 X 45,0 MM
30.037.84011	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 4,0 X 50,0 MM
30.037.84012	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 4,0 X 55,0 MM
30.037.85001	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 4,5 X 20,0 MM
30.037.85002	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 4,5 X 25,0 MM
30.037.85003	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 4,5 X 30,0 MM
30.037.85004	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 4,5 X 35,0 MM
30.037.85005	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 4,5 X 40,0 MM
30.037.85006	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 4,5 X 45,0 MM
30.037.85007	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 4,5 X 50,0 MM
30.037.85008	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 4,5 X 55,0 MM
30.037.86001	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 5,0 X 20,0 MM
30.037.86002	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 5,0 X 25,0 MM

30.037.86003	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 5,0 X 30,0 MM
30.037.86004	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 5,0 X 35,0 MM
30.037.86005	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 5,0 X 40,0 MM
30.037.86006	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 5,0 X 45,0 MM
30.037.86007	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 5,0 X 50,0 MM
30.037.86008	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 5,0 X 55,0 MM
30.037.20001	BARRA UNIAO MINI-OSTEO MIS Ø 5,5 X 30,0 MM
30.037.20002	BARRA UNIAO MINI-OSTEO MIS Ø 5,5 X 35,0 MM
30.037.20003	BARRA UNIAO MINI-OSTEO MIS Ø 5,5 X 40,0 MM
30.037.20004	BARRA UNIAO MINI-OSTEO MIS Ø 5,5 X 45,0 MM
30.037.20005	BARRA UNIAO MINI-OSTEO MIS Ø 5,5 X 50,0 MM
30.037.20006	BARRA UNIAO MINI-OSTEO MIS Ø 5,5 X 55,0 MM
30.037.20007	BARRA UNIAO MINI-OSTEO MIS Ø 5,5 X 60,0 MM
30.037.20008	BARRA UNIAO MINI-OSTEO MIS Ø 5,5 X 65,0 MM
30.037.20009	BARRA UNIAO MINI-OSTEO MIS Ø 5,5 X 70,0 MM
30.037.20010	BARRA UNIAO MINI-OSTEO MIS Ø 5,5 X 75,0 MM
30.037.20011	BARRA UNIAO MINI-OSTEO MIS Ø 5,5 X 80,0 MM
30.037.20012	BARRA UNIAO MINI-OSTEO MIS Ø 5,5 X 85,0 MM
30.037.20013	BARRA UNIAO MINI-OSTEO MIS Ø 5,5 X 90,0 MM
30.037.20014	BARRA UNIAO MINI-OSTEO MIS Ø 5,5 X 100,0 MM
30.037.20015	BARRA UNIAO MINI-OSTEO MIS Ø 5,5 X 110,0 MM
30.037.20016	BARRA UNIAO MINI-OSTEO MIS Ø 5,5 X 120,0 MM
30.037.20017	BARRA UNIAO MINI-OSTEO MIS Ø 5,5 X 130,0 MM
30.037.20018	BARRA UNIAO MINI-OSTEO MIS Ø 5,5 X 140,0 MM
30.037.25001	BARRA UNIAO MINI-OSTEO Ø 5,5 X 30,0 MM

30.037.25002	BARRA UNIAO MINI-OSTEO Ø 5,5 X 35,0 MM
30.037.25003	BARRA UNIAO MINI-OSTEO Ø 5,5 X 40,0 MM
30.037.25004	BARRA UNIAO MINI-OSTEO Ø 5,5 X 45,0 MM
30.037.25005	BARRA UNIAO MINI-OSTEO Ø 5,5 X 50,0 MM
30.037.25006	BARRA UNIAO MINI-OSTEO Ø 5,5 X 55,0 MM
30.037.25007	BARRA UNIAO MINI-OSTEO Ø 5,5 X 60,0 MM
30.037.25008	BARRA UNIAO MINI-OSTEO Ø 5,5 X 65,0 MM
30.037.25009	BARRA UNIAO MINI-OSTEO Ø 5,5 X 70,0 MM
30.037.25010	BARRA UNIAO MINI-OSTEO Ø 5,5 X 75,0 MM
30.037.25011	BARRA UNIAO MINI-OSTEO Ø 5,5 X 80,0 MM
30.037.25012	BARRA UNIAO MINI-OSTEO Ø 5,5 X 85,0 MM
30.037.25013	BARRA UNIAO MINI-OSTEO Ø 5,5 X 90,0 MM
30.037.25014	BARRA UNIAO MINI-OSTEO Ø 5,5 X 100,0 MM
30.037.25015	BARRA UNIAO MINI-OSTEO Ø 5,5 X 110,0 MM
30.037.25016	BARRA UNIAO MINI-OSTEO Ø 5,5 X 120,0 MM
30.037.25017	BARRA UNIAO MINI-OSTEO Ø 5,5 X 130,0 MM
30.037.25018	BARRA UNIAO MINI-OSTEO Ø 5,5 X 140,0 MM
30.037.25019	BARRA UNIAO MINI-OSTEO Ø 5,5 X 150,0 MM
30.037.25020	BARRA UNIAO MINI-OSTEO Ø 5,5 X 160,0 MM
30.037.25021	BARRA UNIAO MINI-OSTEO Ø 5,5 X 170,0 MM
30.037.25022	BARRA UNIAO MINI-OSTEO Ø 5,5 X 180,0 MM
30.037.25023	BARRA UNIAO MINI-OSTEO Ø 5,5 X 190,0 MM
30.037.25024	BARRA UNIAO MINI-OSTEO Ø 5,5 X 200,0 MM
30.037.25025	BARRA UNIAO MINI-OSTEO Ø 5,5 X 210,0 MM
30.037.25026	BARRA UNIAO MINI-OSTEO Ø 5,5 X 220,0 MM
30.037.25027	BARRA UNIAO MINI-OSTEO Ø 5,5 X 230,0 MM
30.037.25028	BARRA UNIAO MINI-OSTEO Ø 5,5 X 240,0 MM

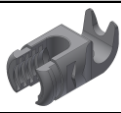
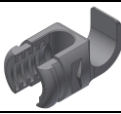
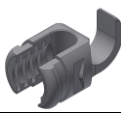
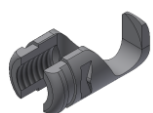
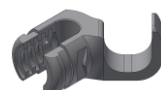
30.037.25029	BARRA UNIAO MINI-OSTEO Ø 5,5 X 250,0 MM
30.037.25030	BARRA UNIAO MINI-OSTEO Ø 5,5 X 260,0 MM
30.037.25031	BARRA UNIAO MINI-OSTEO Ø 5,5 X 270,0 MM
30.037.25032	BARRA UNIAO MINI-OSTEO Ø 5,5 X 280,0 MM
30.037.25033	BARRA UNIAO MINI-OSTEO Ø 5,5 X 290,0 MM
30.037.25034	BARRA UNIAO MINI-OSTEO Ø 5,5 X 300,0 MM
30.037.25035	BARRA UNIAO MINI-OSTEO Ø 5,5 X 350,0 MM
30.037.25036	BARRA UNIAO MINI-OSTEO Ø 5,5 X 400,0 MM
30.037.25037	BARRA UNIAO MINI-OSTEO Ø 5,5 X 450,0 MM
30.037.25038	BARRA UNIAO MINI-OSTEO Ø 5,5 X 500,0 MM
30.037.24001	BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA Ø 5,5 X 30,0 MM
30.037.24002	BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA Ø 5,5 X 35,0 MM
30.037.24003	BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA Ø 5,5 X 40,0 MM
30.037.24004	BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA Ø 5,5 X 45,0 MM
30.037.24005	BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA Ø 5,5 X 50,0 MM
30.037.24006	BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA Ø 5,5 X 55,0 MM
30.037.24007	BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA Ø 5,5 X 60,0 MM
30.037.24008	BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA Ø 5,5 X 65,0 MM
30.037.24009	BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA Ø 5,5 X 70,0 MM
30.037.24010	BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA Ø 5,5 X 75,0 MM
30.037.24011	BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA Ø 5,5 X 80,0 MM
30.037.24012	BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA Ø 5,5 X 85,0 MM
30.037.24013	BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA Ø 5,5 X 90,0 MM
30.037.24014	BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA Ø 5,5 X 100,0 MM
30.037.24015	BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA Ø 5,5 X 110,0 MM
30.037.24016	BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA Ø 5,5 X 120,0 MM
30.037.24017	BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA Ø 5,5 X 130,0 MM

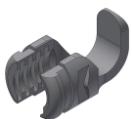
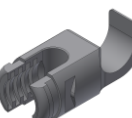
30.037.24018	BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA Ø 5,5 X 140,0 MM
30.037.24019	BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA Ø 5,5 X 150,0 MM
30.037.24020	BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA Ø 5,5 X 160,0 MM
30.037.24021	BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA Ø 5,5 X 170,0 MM
30.037.24022	BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA Ø 5,5 X 180,0 MM
30.037.24023	BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA Ø 5,5 X 190,0 MM
30.037.24024	BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA Ø 5,5 X 200,0 MM
30.037.24025	BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA Ø 5,5 X 210,0 MM
30.037.24026	BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA Ø 5,5 X 220,0 MM
30.037.24027	BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA Ø 5,5 X 230,0 MM
30.037.24028	BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA Ø 5,5 X 240,0 MM
30.037.24029	BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA Ø 5,5 X 250,0 MM
30.037.24030	BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA Ø 5,5 X 260,0 MM
30.037.24031	BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA Ø 5,5 X 270,0 MM
30.037.24032	BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA Ø 5,5 X 280,0 MM
30.037.24033	BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA Ø 5,5 X 290,0 MM
30.037.24034	BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA Ø 5,5 X 300,0 MM
30.037.24035	BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA Ø 5,5 X 350,0 MM
30.037.24036	BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA Ø 5,5 X 400,0 MM
30.037.24037	BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA Ø 5,5 X 450,0 MM
30.037.24038	BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA Ø 5,5 X 500,0 MM
30.037.21001	BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO Ø 5,5 X 3,18 x 70,0 MM
30.037.21002	BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO Ø 5,5 X 3,18 x 80,0 MM
30.037.21003	BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO Ø 5,5 X 3,18 x 90,0 MM
30.037.21004	BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO Ø 5,5 X 3,18 x 100,0 MM
30.037.21005	BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO Ø 5,5 X 3,18 x 110,0 MM

30.037.21006	BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO Ø 5,5 X 3,18 x 120,0 MM
30.037.21007	BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO Ø 5,5 X 3,18 x 130,0 MM
30.037.21008	BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO Ø 5,5 X 3,18 x 140,0 MM
30.037.21009	BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO Ø 5,5 X 3,18 x 150,0 MM
30.037.21010	BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO Ø 5,5 X 3,18 x 160,0 MM
30.037.21011	BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO Ø 5,5 X 3,18 x 170,0 MM
30.037.21012	BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO Ø 5,5 X 3,18 x 180,0 MM
30.037.21013	BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO Ø 5,5 X 3,18 x 190,0 MM
30.037.21014	BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO Ø 5,5 X 3,18 x 200,0 MM
30.037.21015	BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO Ø 5,5 X 3,18 x 210,0 MM
30.037.21016	BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO Ø 5,5 X 3,18 x 220,0 MM
30.037.21017	BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO Ø 5,5 X 3,18 x 230,0 MM
30.037.21018	BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO Ø 5,5 X 3,18 x 240,0 MM
30.037.21019	BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO Ø 5,5 X 3,18 x 250,0 MM
30.037.21020	BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO Ø 5,5 X 3,18 x 260,0 MM
30.037.21021	BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO Ø 5,5 X 3,18 x 270,0 MM
30.037.21022	BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO Ø 5,5 X 3,18 x 280,0 MM
30.037.21023	BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO Ø 5,5 X 3,18 x 290,0 MM
30.037.21024	BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO Ø 5,5 X 3,18 x 300,0 MM
30.037.21025	BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO Ø 5,5 X 3,18 x 350,0 MM
30.037.21026	BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO Ø 5,5 X 3,18 x 400,0 MM
30.037.21027	BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO Ø 5,5 X 3,18 x 450,0 MM
30.037.21028	BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO Ø 5,5 X 3,18 x 500,0 MM
30.037.22001	BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO Ø 5,5 X 4,0 x 70,0 MM
30.037.22002	BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO Ø 5,5 X 4,0 x 80,0 MM
30.037.22003	BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO Ø 5,5 X 4,0 x 90,0 MM
30.037.22004	BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO Ø 5,5 X 4,0 x 100,0 MM

30.037.22005	BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO Ø 5,5 X 4,0 x 110,0 MM
30.037.22006	BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO Ø 5,5 X 4,0 x 120,0 MM
30.037.22007	BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO Ø 5,5 X 4,0 x 130,0 MM
30.037.22008	BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO Ø 5,5 X 4,0 x 140,0 MM
30.037.22009	BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO Ø 5,5 X 4,0 x 150,0 MM
30.037.22010	BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO Ø 5,5 X 4,0 x 160,0 MM
30.037.22011	BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO Ø 5,5 X 4,0 x 170,0 MM
30.037.22012	BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO Ø 5,5 X 4,0 x 180,0 MM
30.037.22013	BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO Ø 5,5 X 4,0 x 190,0 MM
30.037.22014	BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO Ø 5,5 X 4,0 x 200,0 MM
30.037.22015	BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO Ø 5,5 X 4,0 x 210,0 MM
30.037.22016	BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO Ø 5,5 X 4,0 x 220,0 MM
30.037.22017	BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO Ø 5,5 X 4,0 x 230,0 MM
30.037.22018	BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO Ø 5,5 X 4,0 x 240,0 MM
30.037.22019	BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO Ø 5,5 X 4,0 x 250,0 MM
30.037.22020	BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO Ø 5,5 X 4,0 x 260,0 MM
30.037.22021	BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO Ø 5,5 X 4,0 x 270,0 MM
30.037.22022	BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO Ø 5,5 X 4,0 x 280,0 MM
30.037.22023	BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO Ø 5,5 X 4,0 x 290,0 MM
30.037.22024	BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO Ø 5,5 X 4,0 x 300,0 MM
30.037.22025	BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO Ø 5,5 X 4,0 x 350,0 MM
30.037.22026	BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO Ø 5,5 X 4,0 x 400,0 MM
30.037.22027	BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO Ø 5,5 X 4,0 x 450,0 MM
30.037.22028	BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO Ø 5,5 X 4,0 x 500,0 MM
30.037.50001	GANCHO DTT MINI-OSTEO
30.013.00024	115-002-035 - BARRA DTT PEDICULAR OSTEOM/DPZ 35 MM

30.013.00025	115-002-035 - BARRA DTT PEDICULAR OSTEOM/DPZ 40 MM
30.013.00026	115-002-035 - BARRA DTT PEDICULAR OSTEOM/DPZ 45 MM
30.013.00027	115-002-035 - BARRA DTT PEDICULAR OSTEOM/DPZ 60 MM
30.013.00028	115-002-035 - BARRA DTT PEDICULAR OSTEOM/DPZ 75 MM
30.013.00030	121 - PARAFUSO DTT PEDICULAR OSTEOM/DPZ
30.037.26001	CONECTOR DE BARRAS SIMPLES Ø 5,5 MM
30.037.26002	CONECTOR DE BARRAS DUPLO Ø 5,5 MM
30.037.26003	CONECTOR DE BARRAS TRIANGULAR Ø 5,5 MM
30.037.26004	CONECTOR DE BARRAS SIMPLES Ø5,5 MM X Ø3,18 MM
30.037.26005	CONECTOR DE BARRAS SIMPLES Ø5,5 MM X Ø4,0 MM
30.037.26006	CONECTOR DE BARRAS SIMPLES Ø5,5 MM X Ø5,0 MM
30.037.26007	CONECTOR DE BARRAS SIMPLES Ø5,5 MM X Ø6,0 MM
30.037.26008	CONECTOR DE BARRAS DUPLO Ø5,5 MM X Ø3,18 MM
30.037.26009	CONECTOR DE BARRAS DUPLO Ø5,5 MM X Ø4,0 MM
30.037.26010	CONECTOR DE BARRAS DUPLO Ø5,5 MM X Ø5,0 MM
30.037.26011	CONECTOR DE BARRAS DUPLO Ø5,5 MM X Ø6,0 MM
30.037.26012	CONECTOR DE BARRAS TRIANGULAR Ø5,5 X Ø3,18 MM
30.037.26013	CONECTOR DE BARRAS TRIANGULAR Ø5,5 X Ø4,0 MM
30.037.26014	CONECTOR DE BARRAS TRIANGULAR Ø5,5 X Ø5,0 MM
30.037.26015	CONECTOR DE BARRAS TRIANGULAR Ø5,5 X Ø6,0 MM
30.037.70001	GANCHO LATERAL MINI-OSTEO 10 MM
30.037.70002	GANCHO LATERAL MINI-OSTEO 15 MM
30.037.70003	GANCHO LATERAL MINI-OSTEO 20 MM
30.037.70004	GANCHO LATERAL MINI-OSTEO 25 MM
30.037.70005	GANCHO LATERAL MINI-OSTEO 30 MM

30.037.60001	DISPOSITIVO DE BLOQUEIO MINI-OSTEO	
30.023.08002	DISPOSITIVO DE BLOQUEIO PARA CONECTORES	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
30.037.70006	GANCHO PEDICULAR PEQUENO MINI-OSTEO	
30.037.70015	GANCHO PEDICULAR MÉDIO MINI-OSTEO	
30.037.70007	GANCHO PEDICULAR GRANDE MINI-OSTEO	
30.037.70008	GANCHO LAMINAR PEQUENO MINI-OSTEO- LÂMINA PADRÃO	
30.037.70016	GANCHO LAMINAR MÉDIO MINI-OSTEO- LÂMINA PADRÃO	
30.037.70010	GANCHO LAMINAR GRANDE MINI-OSTEO- LÂMINA PADRÃO	
30.037.70009	GANCHO LAMINAR PEQUENO MINI-OSTEO- LÂMINA ESTREITA	
30.037.70017	GANCHO LAMINAR MÉDIO MINI-OSTEO- LÂMINA ESTREITA	
30.037.70011	GANCHO LAMINAR GRANDE MINI-OSTEO- LÂMINA ESTREITA	
30.037.70018	GANCHO LAMINAR TORÁCICO COM DESVIO PEQUENO MINI-OSTEO- DIREITO	
30.037.70019	GANCHO LAMINAR TORÁCICO COM DESVIO MÉDIO MINI-OSTEO- DIREITO	
30.037.70020	GANCHO LAMINAR TORÁCICO COM DESVIO GRANDE MINI-OSTEO- DIREITO	
30.037.70021	GANCHO LAMINAR TORÁCICO COM DESVIO PEQUENO MINI-OSTEO- ESQUERDO	
30.037.70022	GANCHO LAMINAR TORÁCICO COM DESVIO MÉDIO MINI-OSTEO- ESQUERDO	
30.037.70023	GANCHO LAMINAR TORÁCICO COM DESVIO GRANDE MINI-OSTEO- ESQUERDO	
30.037.70012	GANCHO DE PROCESSO TRANSVERSO PEQUENO MINI-OSTEO- DIREITO	
30.037.70024	GANCHO DE PROCESSO TRANSVERSO MÉDIO MINI-OSTEO- DIREITO	
30.037.70025	GANCHO DE PROCESSO TRANSVERSO GRANDE MINI-OSTEO- DIREITO	
30.037.70013	GANCHO DE PROCESSO TRANSVERSO PEQUENO MINI-OSTEO- ESQUERDO	
30.037.70026	GANCHO DE PROCESSO TRANSVERSO MÉDIO MINI-OSTEO- ESQUERDO	
30.037.70027	GANCHO DE PROCESSO TRANSVERSO GRANDE MINI-OSTEO- ESQUERDO	
30.037.70028	GANCHO LAMINAR TORÁCICO PEQUENO MINI-OSTEO- LÂMINA ESTREITA	
30.037.70029	GANCHO LAMINAR TORÁCICO MÉDIO MINI-OSTEO- LÂMINA ESTREITA	
30.037.70030	GANCHO LAMINAR TORÁCICO GRANDE MINI-OSTEO- LÂMINA ESTREITA	

30.037.70031	GANCHO LAMINAR TORÁCICO PEQUENO MINI-OSTEO- LÂMINA PADRÃO	
30.037.70032	GANCHO LAMINAR TORÁCICO MÉDIO MINI-OSTEO- LÂMINA PADRÃO	
30.037.70033	GANCHO LAMINAR TORÁCICO GRANDE MINI-OSTEO- LÂMINA PADRÃO	
30.037.70034	GANCHO LAMINAR PEQUENO MINI-OSTEO- LÂMINA ANGULADA	
30.037.70035	GANCHO LAMINAR MÉDIO MINI-OSTEO- LÂMINA ANGULADA	
30.037.70036	GANCHO LAMINAR GRANDE MINI-OSTEO- LÂMINA ANGULADA	
30.037.70037	GANCHO LAMINAR PEQUENO MINI-OSTEO- CORPO ALONGADO	
30.037.70038	GANCHO LAMINAR MÉDIO MINI-OSTEO- CORPO ALONGADO	
30.037.70039	GANCHO LAMINAR GRANDE MINI-OSTEO- CORPO ALONGADO	

30.037.15001	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 4,5 X 20,0 MM
30.037.15002	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 4,5 X 25,0 MM
30.037.15003	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 4,5 X 30,0 MM
30.037.15004	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 4,5 X 35,0 MM
30.037.15005	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 4,5 X 40,0 MM
30.037.15006	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 4,5 X 45,0 MM
30.037.15007	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 4,5 X 50,0 MM
30.037.15008	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 4,5 X 55,0 MM
30.037.15009	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 4,5 X 60,0 MM
30.037.16001	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 5,0 X 20,0 MM
30.037.16002	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 5,0 X 25,0 MM
30.037.16003	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 5,0 X 30,0 MM
30.037.16004	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 5,0 X 35,0 MM
30.037.16005	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 5,0 X 40,0 MM
30.037.16006	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 5,0 X 45,0 MM
30.037.16007	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 5,0 X 50,0 MM
30.037.16008	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 5,0 X 55,0 MM
30.037.16009	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 5,0 X 60,0 MM
30.037.15010	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 4,5 X 20,0 MM
30.037.15011	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 4,5 X 25,0 MM
30.037.15012	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 4,5 X 30,0 MM
30.037.15013	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 4,5 X 35,0 MM
30.037.15014	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 4,5 X 40,0 MM
30.037.15015	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 4,5 X 45,0 MM
30.037.15016	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 4,5 X 50,0 MM
30.037.15017	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 4,5 X 55,0 MM
30.037.15018	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 4,5 X 60,0 MM
30.037.16010	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 5,0 X 20,0 MM

30.037.16011	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 5,0 X 25,0 MM
30.037.16012	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 5,0 X 30,0 MM
30.037.16013	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 5,0 X 35,0 MM
30.037.16014	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 5,0 X 40,0 MM
30.037.16015	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 5,0 X 45,0 MM
30.037.16016	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 5,0 X 50,0 MM
30.037.16017	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 5,0 X 55,0 MM
30.037.16018	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 5,0 X 60,0 MM
30.037.00007	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 5,5 X 35,0 MM
30.037.00008	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 5,5 X 40,0 MM
30.037.00009	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 5,5 X 45,0 MM
30.037.00010	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 5,5 X 50,0 MM
30.037.00011	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 5,5 X 55,0 MM
30.037.00012	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 5,5 X 60,0 MM
30.037.01007	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,0 X 35,0 MM
30.037.01008	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,0 X 40,0 MM
30.037.01009	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,0 X 45,0 MM
30.037.01010	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,0 X 50,0 MM
30.037.01011	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,0 X 55,0 MM
30.037.01012	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,0 X 60,0 MM
30.037.02007	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,5 X 35,0 MM
30.037.02008	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,5 X 40,0 MM
30.037.02009	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,5 X 45,0 MM
30.037.02010	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,5 X 50,0 MM
30.037.02011	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,5 X 55,0 MM
30.037.02012	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,5 X 60,0 MM
30.037.03007	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,0 X 35,0 MM
30.037.03008	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,0 X 40,0 MM
30.037.03009	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,0 X 45,0 MM
30.037.03010	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,0 X 50,0 MM
30.037.03011	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,0 X 55,0 MM
30.037.03012	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,0 X 60,0 MM
30.037.04007	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,5 X 35,0 MM
30.037.04008	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,0 X 40,0 MM
30.037.04009	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,0 X 45,0 MM
30.037.04010	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,0 X 50,0 MM
30.037.04011	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,0 X 55,0 MM
30.037.04012	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,0 X 60,0 MM
30.037.05015	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 8,0 X 35,0 MM
30.037.05016	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 8,0 X 40,0 MM
30.037.05017	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 8,0 X 45,0 MM

30.037.05018	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 8,0 X 50,0 MM
30.037.05019	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 8,0 X 55,0 MM
30.037.05020	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 8,0 X 60,0 MM
30.037.05021	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 8,0 X 65,0 MM
30.037.05022	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 8,0 X 70,0 MM
30.037.05023	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 8,0 X 75,0 MM
30.037.05024	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 8,0 X 80,0 MM
30.037.05025	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 8,0 X 85,0 MM
30.037.05026	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 8,0 X 90,0 MM
30.037.05027	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 8,0 X 95,0 MM
30.037.05028	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 8,0 X 100,0 MM
30.037.06015	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 8,5 X 35,0 MM
30.037.06016	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 8,5 X 40,0 MM
30.037.06017	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 8,5 X 45,0 MM
30.037.06018	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 8,5 X 50,0 MM
30.037.06019	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 8,5 X 55,0 MM
30.037.06020	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 8,5 X 60,0 MM
30.037.06021	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 8,5 X 65,0 MM
30.037.06022	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 8,5 X 70,0 MM
30.037.06023	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 8,5 X 75,0 MM
30.037.06024	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 8,5 X 80,0 MM
30.037.06025	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 8,5 X 85,0 MM
30.037.06026	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 8,5 X 90,0 MM
30.037.06027	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 8,5 X 95,0 MM
30.037.06028	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 8,5 X 100,0 MM
30.037.07015	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 9,0 X 35,0 MM
30.037.07016	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 9,0 X 40,0 MM
30.037.07017	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 9,0 X 45,0 MM
30.037.07018	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 9,0 X 50,0 MM
30.037.07019	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 9,0 X 55,0 MM
30.037.07020	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 9,0 X 60,0 MM
30.037.07021	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 9,0 X 65,0 MM
30.037.07022	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 9,0 X 70,0 MM
30.037.07023	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 9,0 X 75,0 MM
30.037.07024	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 9,0 X 80,0 MM
30.037.07025	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 9,0 X 85,0 MM
30.037.07026	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 9,0 X 90,0 MM
30.037.07027	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 9,0 X 95,0 MM
30.037.07028	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 9,0 X 100,0 MM
30.037.10007	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 5,5 X 35,0 MM
30.037.10008	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 5,5 X 40,0 MM

30.037.10009	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 5,5 X 45,0 MM
30.037.10010	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 5,5 X 50,0 MM
30.037.10011	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 5,5 X 55,0 MM
30.037.10012	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 5,5 X 60,0 MM
30.037.11007	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,0 X 35,0 MM
30.037.11008	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,0 X 40,0 MM
30.037.11009	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,0 X 45,0 MM
30.037.11010	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,0 X 50,0 MM
30.037.11011	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,0 X 55,0 MM
30.037.11012	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,0 X 60,0 MM
30.037.12007	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,5 X 35,0 MM
30.037.12008	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,5 X 40,0 MM
30.037.12009	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,5 X 45,0 MM
30.037.12010	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,5 X 50,0 MM
30.037.12011	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,5 X 55,0 MM
30.037.12012	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,5 X 60,0 MM
30.037.13007	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,0 X 35,0 MM
30.037.13008	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,0 X 40,0 MM
30.037.13009	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,0 X 45,0 MM
30.037.13010	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,0 X 50,0 MM
30.037.13011	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,0 X 55,0 MM
30.037.13012	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,0 X 60,0 MM
30.037.14007	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,5 X 35,0 MM
30.037.14008	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,5 X 40,0 MM
30.037.14009	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,5 X 45,0 MM
30.037.14010	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,5 X 50,0 MM
30.037.14011	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,5 X 55,0 MM
30.037.14012	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,5 X 60,0 MM
30.037.15010	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 4,5 X 20,0 MM
30.037.15011	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 4,5 X 25,0 MM
30.037.15012	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 4,5 X 30,0 MM
30.037.15013	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 4,5 X 35,0 MM
30.037.15014	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 4,5 X 40,0 MM
30.037.15015	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 4,5 X 45,0 MM
30.037.15016	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 4,5 X 50,0 MM
30.037.15017	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 4,5 X 55,0 MM
30.037.15018	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 4,5 X 60,0 MM
30.037.16010	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 5,0 X 20,0 MM
30.037.16011	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 5,0 X 25,0 MM
30.037.16012	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 5,0 X 30,0 MM
30.037.16013	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 5,0 X 35,0 MM

30.037.16014	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 5,0 X 40,0 MM
30.037.16015	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 5,0 X 45,0 MM
30.037.16016	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 5,0 X 50,0 MM
30.037.16017	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 5,0 X 55,0 MM
30.037.16018	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 5,0 X 60,0 MM
30.037.51007	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 5,5 X 35,0 MM
30.037.51008	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 5,5 X 40,0 MM
30.037.51009	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 5,5 X 45,0 MM
30.037.51010	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 5,5 X 50,0 MM
30.037.51011	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 5,5 X 55,0 MM
30.037.51012	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 5,5 X 60,0 MM
30.037.52007	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,0 X 35,0 MM
30.037.52008	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,0 X 40,0 MM
30.037.52009	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,0 X 45,0 MM
30.037.52010	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,0 X 50,0 MM
30.037.52011	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,0 X 55,0 MM
30.037.52012	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,0 X 60,0 MM
30.037.53007	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,5 X 35,0 MM
30.037.53008	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,5 X 40,0 MM
30.037.53009	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,5 X 45,0 MM
30.037.53010	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,5 X 50,0 MM
30.037.53011	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,5 X 55,0 MM
30.037.53012	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,5 X 60,0 MM
30.037.54007	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,0 X 35,0 MM
30.037.54008	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,0 X 40,0 MM

30.037.54009	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,0 X 45,0 MM
30.037.54010	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,0 X 50,0 MM
30.037.54011	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,0 X 55,0 MM
30.037.54012	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,0 X 60,0 MM
30.037.55007	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,5 X 35,0 MM
30.037.55008	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,5 X 40,0 MM
30.037.55009	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,5 X 45,0 MM
30.037.55010	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,5 X 50,0 MM
30.037.55011	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,5 X 55,0 MM
30.037.55012	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,5 X 60,0 MM
30.037.56015	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 8,0 X 35,0 MM
30.037.56016	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 8,0 X 40,0 MM
30.037.56017	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 8,0 X 45,0 MM
30.037.56018	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 8,0 X 50,0 MM
30.037.56019	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 8,0 X 55,0 MM
30.037.56020	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 8,0 X 60,0 MM
30.037.56021	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 8,0 X 65,0 MM
30.037.56022	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 8,0 X 70,0 MM
30.037.56023	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 8,0 X 75,0 MM
30.037.56024	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 8,0 X 80,0 MM
30.037.56025	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 8,0 X 85,0 MM
30.037.56026	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 8,0 X 90,0 MM
30.037.56027	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 8,0 X 95,0 MM

30.037.56028	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 8,0 X 100,0 MM
30.037.57015	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 8,5 X 35,0 MM
30.037.57016	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 8,5 X 40,0 MM
30.037.57017	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 8,5 X 45,0 MM
30.037.57018	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 8,5 X 50,0 MM
30.037.57019	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 8,5 X 55,0 MM
30.037.57020	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 8,5 X 60,0 MM
30.037.57021	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 8,5 X 65,0 MM
30.037.57022	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 8,5 X 70,0 MM
30.037.57023	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 8,5 X 75,0 MM
30.037.57024	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 8,5 X 80,0 MM
30.037.57025	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 8,5 X 85,0 MM
30.037.57026	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 8,5 X 90,0 MM
30.037.57027	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 8,5 X 95,0 MM
30.037.57028	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 8,5 X 100,0 MM
30.037.58015	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 9,0 X 35,0 MM
30.037.58016	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 9,0 X 40,0 MM
30.037.58017	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 9,0 X 45,0 MM
30.037.58018	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 9,0 X 50,0 MM
30.037.58019	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 9,0 X 55,0 MM
30.037.58020	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 9,0 X 60,0 MM
30.037.58021	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 9,0 X 65,0 MM
30.037.58022	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 9,0 X 70,0 MM

30.037.58023	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 9,0 X 75,0 MM
30.037.58024	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 9,0 X 80,0 MM
30.037.58025	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 9,0 X 85,0 MM
30.037.58026	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 9,0 X 90,0 MM
30.037.58027	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 9,0 X 95,0 MM
30.037.58028	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 9,0 X 100,0 MM
30.037.61007	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 5,5 X 35,0 MM
30.037.61008	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 5,5 X 40,0 MM
30.037.61009	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 5,5 X 45,0 MM
30.037.61010	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 5,5 X 50,0 MM
30.037.61011	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 5,5 X 55,0 MM
30.037.61012	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 5,5 X 60,0 MM
30.037.62007	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,0 X 35,0 MM
30.037.62008	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,0 X 40,0 MM
30.037.62009	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,0 X 45,0 MM
30.037.62010	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,0 X 50,0 MM
30.037.62011	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,0 X 55,0 MM
30.037.62012	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,0 X 60,0 MM
30.037.63007	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,5 X 35,0 MM
30.037.63008	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,5 X 40,0 MM
30.037.63009	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,5 X 45,0 MM
30.037.63010	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,5 X 50,0 MM
30.037.63011	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,5 X 55,0 MM
30.037.63012	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,5 X 60,0 MM
30.037.64007	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,0 X 35,0 MM
30.037.64008	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,0 X 40,0 MM
30.037.64009	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,0 X 45,0 MM
30.037.64010	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,0 X 50,0 MM
30.037.64011	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,0 X 55,0 MM
30.037.64012	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,0 X 60,0 MM
30.037.65007	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,5 X 35,0 MM
30.037.65008	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,5 X 40,0 MM
30.037.65009	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,5 X 45,0 MM
30.037.65010	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,5 X 50,0 MM
30.037.65011	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,5 X 55,0 MM
30.037.65012	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,5 X 60,0 MM

30.037.66001	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 4,5 X 20,0 MM
30.037.66002	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 4,5 X 25,0 MM
30.037.66003	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 4,5 X 30,0 MM
30.037.66004	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 4,5 X 35,0 MM
30.037.66005	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 4,5 X 40,0 MM
30.037.66006	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 4,5 X 45,0 MM
30.037.66007	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 4,5 X 50,0 MM
30.037.66008	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 4,5 X 55,0 MM
30.037.66009	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 4,5 X 60,0 MM
30.037.66010	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 4,5 X 20,0 MM
30.037.66011	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 4,5 X 25,0 MM
30.037.66012	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 4,5 X 30,0 MM
30.037.66013	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 4,5 X 35,0 MM
30.037.66014	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 4,5 X 40,0 MM
30.037.66015	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 4,5 X 45,0 MM
30.037.66016	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 4,5 X 50,0 MM
30.037.66017	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 4,5 X 55,0 MM
30.037.66018	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 4,5 X 60,0 MM
30.037.67001	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 5,0 X 20,0 MM
30.037.67002	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 5,0 X 25,0 MM
30.037.67003	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 5,0 X 30,0 MM
30.037.67004	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 5,0 X 35,0 MM
30.037.67005	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 5,0 X 40,0 MM
30.037.67006	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 5,0 X 45,0 MM
30.037.67007	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 5,0 X 50,0 MM
30.037.67008	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 5,0 X 55,0 MM
30.037.67009	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 5,0 X 60,0 MM
30.037.67010	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 5,0 X 20,0 MM
30.037.67011	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 5,0 X 25,0 MM
30.037.67012	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 5,0 X 30,0 MM
30.037.67013	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 5,0 X 35,0 MM
30.037.67014	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 5,0 X 40,0 MM
30.037.67015	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 5,0 X 45,0 MM
30.037.67016	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 5,0 X 50,0 MM
30.037.67017	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 5,0 X 55,0 MM
30.037.67018	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 5,0 X 60,0 MM
30.037.01021	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 6,0 X 65,0 MM
30.037.01022	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 6,0 X 70,0 MM
30.037.01023	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 6,0 X 75,0 MM
30.037.01024	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 6,0 X 80,0 MM
30.037.01025	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 6,0 X 85,0 MM

30.037.01026	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 6,0 X 90,0 MM
30.037.01027	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 6,0 X 95,0 MM
30.037.01028	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 6,0 X 100,0 MM
30.037.02021	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 6,5 X 65,0 MM
30.037.02022	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 6,5 X 70,0 MM
30.037.02023	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 6,5 X 75,0 MM
30.037.02024	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 6,5 X 80,0 MM
30.037.02025	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 6,5 X 85,0 MM
30.037.02026	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 6,5 X 90,0 MM
30.037.02027	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 6,5 X 95,0 MM
30.037.02028	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 6,5 X 100,0 MM
30.037.03021	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 7,0 X 65,0 MM
30.037.03022	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 7,0 X 70,0 MM
30.037.03023	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 7,0 X 75,0 MM
30.037.03024	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 7,0 X 80,0 MM
30.037.03025	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 7,0 X 85,0 MM
30.037.03026	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 7,0 X 90,0 MM
30.037.03027	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 7,0 X 95,0 MM
30.037.03028	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 7,0 X 100,0 MM
30.037.04021	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 7,5 X 65,0 MM
30.037.04022	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 7,5 X 70,0 MM
30.037.04023	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 7,5 X 75,0 MM
30.037.04024	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 7,5 X 80,0 MM
30.037.04025	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 7,5 X 85,0 MM
30.037.04026	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 7,5 X 90,0 MM
30.037.04027	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 7,5 X 95,0 MM
30.037.04028	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 7,5 X 100,0 MM
30.037.11021	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 6,0 X 65,0 MM
30.037.11022	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 6,0 X 70,0 MM
30.037.11023	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 6,0 X 75,0 MM
30.037.11024	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 6,0 X 80,0 MM
30.037.11025	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 6,0 X 85,0 MM
30.037.11026	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 6,0 X 90,0 MM
30.037.11027	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 6,0 X 95,0 MM
30.037.11028	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 6,0 X 100,0 MM
30.037.12021	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 6,5 X 65,0 MM
30.037.12022	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 6,5 X 70,0 MM
30.037.12023	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 6,5 X 75,0 MM
30.037.12024	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 6,5 X 80,0 MM
30.037.12025	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 6,5 X 85,0 MM
30.037.12026	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 6,5 X 90,0 MM

30.037.12027	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 6,5 X 95,0 MM
30.037.12028	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 6,5 X 100,0 MM
30.037.13021	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 7,0 X 65,0 MM
30.037.13022	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 7,0 X 70,0 MM
30.037.13023	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 7,0 X 75,0 MM
30.037.13024	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 7,0 X 80,0 MM
30.037.13025	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 7,0 X 85,0 MM
30.037.13026	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 7,0 X 90,0 MM
30.037.13027	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 7,0 X 95,0 MM
30.037.13028	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 7,0 X 100,0 MM
30.037.14021	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 7,5 X 65,0 MM
30.037.14022	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 7,5 X 70,0 MM
30.037.14023	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 7,5 X 75,0 MM
30.037.14024	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 7,5 X 80,0 MM
30.037.14025	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 7,5 X 85,0 MM
30.037.14026	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 7,5 X 90,0 MM
30.037.14027	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 7,5 X 95,0 MM
30.037.14028	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Ø 7,5 X 100,0 MM
30.037.41007	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 6,0 X 65,0 MM
30.037.41008	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 6,0 X 70,0 MM
30.037.41009	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 6,0 X 75,0 MM
30.037.41010	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 6,0 X 80,0 MM
30.037.41011	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 6,0 X 85,0 MM
30.037.41012	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 6,0 X 90,0 MM
30.037.41013	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 6,0 X 95,0 MM
30.037.41014	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 6,0 X 100,0 MM
30.037.42007	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 6,5 X 65,0 MM
30.037.42008	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 6,5 X 70,0 MM
30.037.42009	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 6,5 X 75,0 MM
30.037.42010	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 6,5 X 80,0 MM
30.037.42011	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 6,5 X 85,0 MM
30.037.42012	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 6,5 X 90,0 MM
30.037.42013	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 6,5 X 95,0 MM
30.037.42014	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO Ø 6,5 X 100,0 MM
30.037.31007	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 6,0 X 65,0 MM
30.037.31008	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 6,0 X 70,0 MM
30.037.31009	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 6,0 X 75,0 MM
30.037.31010	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 6,0 X 80,0 MM
30.037.31011	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 6,0 X 85,0 MM
30.037.31012	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 6,0 X 90,0 MM
30.037.31013	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 6,0 X 95,0 MM

30.037.31014	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 6,0 X 100,0 MM
30.037.32007	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 6,5 X 65,0 MM
30.037.32008	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 6,5 X 70,0 MM
30.037.32009	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 6,5 X 75,0 MM
30.037.32010	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 6,5 X 80,0 MM
30.037.32011	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 6,5 X 85,0 MM
30.037.32012	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 6,5 X 90,0 MM
30.037.32013	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 6,5 X 95,0 MM
30.037.32014	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO Ø 6,5 X 100,0 MM
30.037.52021	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 6,0 X 65,0 MM
30.037.52022	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 6,0 X 70,0 MM
30.037.52023	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 6,0 X 75,0 MM
30.037.52024	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 6,0 X 80,0 MM
30.037.52025	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 6,0 X 85,0 MM
30.037.52026	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 6,0 X 90,0 MM
30.037.52027	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 6,0 X 95,0 MM
30.037.52028	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 6,0 X 100,0 MM
30.037.53021	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 6,5 X 65,0 MM
30.037.53022	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 6,5 X 70,0 MM
30.037.53023	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 6,5 X 75,0 MM
30.037.53024	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 6,5 X 80,0 MM
30.037.53025	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 6,5 X 85,0 MM
30.037.53026	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 6,5 X 90,0 MM
30.037.53027	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 6,5 X 95,0 MM
30.037.53028	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 6,5 X 100,0 MM
30.037.54021	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 7,0 X 65,0 MM
30.037.54022	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 7,0 X 70,0 MM
30.037.54023	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 7,0 X 75,0 MM
30.037.54024	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 7,0 X 80,0 MM
30.037.54025	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 7,0 X 85,0 MM
30.037.54026	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 7,0 X 90,0 MM
30.037.54027	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 7,0 X 95,0 MM
30.037.54028	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 7,0 X 100,0 MM
30.037.55021	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 7,5 X 65,0 MM
30.037.55022	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 7,5 X 70,0 MM
30.037.55023	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 7,5 X 75,0 MM
30.037.55024	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 7,5 X 80,0 MM
30.037.55025	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 7,5 X 85,0 MM
30.037.55026	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 7,5 X 90,0 MM
30.037.55027	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 7,5 X 95,0 MM
30.037.55028	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 7,5 X 100,0 MM

30.037.62021	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 6,0 X 65,0 MM
30.037.62022	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 6,0 X 70,0 MM
30.037.62023	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 6,0 X 75,0 MM
30.037.62024	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 6,0 X 80,0 MM
30.037.62025	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 6,0 X 85,0 MM
30.037.62026	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 6,0 X 90,0 MM
30.037.62027	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 6,0 X 95,0 MM
30.037.62028	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 6,0 X 100,0 MM
30.037.63021	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 6,5 X 65,0 MM
30.037.63022	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 6,5 X 70,0 MM
30.037.63023	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 6,5 X 75,0 MM
30.037.63024	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 6,5 X 80,0 MM
30.037.63025	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 6,5 X 85,0 MM
30.037.63026	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 6,5 X 90,0 MM
30.037.63027	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 6,5 X 95,0 MM
30.037.63028	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 6,5 X 100,0 MM
30.037.64021	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 7,0 X 65,0 MM
30.037.64022	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 7,0 X 70,0 MM
30.037.64023	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 7,0 X 75,0 MM
30.037.64024	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 7,0 X 80,0 MM
30.037.64025	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 7,0 X 85,0 MM
30.037.64026	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 7,0 X 90,0 MM
30.037.64027	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 7,0 X 95,0 MM
30.037.64028	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 7,0 X 100,0 MM
30.037.65021	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 7,5 X 65,0 MM
30.037.65022	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 7,5 X 70,0 MM
30.037.65023	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 7,5 X 75,0 MM
30.037.65024	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 7,5 X 80,0 MM
30.037.65025	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 7,5 X 85,0 MM
30.037.65026	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 7,5 X 90,0 MM
30.037.65027	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 7,5 X 95,0 MM
30.037.65028	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS Ø 7,5 X 100,0 MM
30.037.76007	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 6,0 X 65,0 MM
30.037.76008	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 6,0 X 70,0 MM
30.037.76009	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 6,0 X 75,0 MM
30.037.76010	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 6,0 X 80,0 MM
30.037.76011	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 6,0 X 85,0 MM
30.037.76012	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 6,0 X 90,0 MM
30.037.76013	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 6,0 X 95,0 MM
30.037.76014	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 6,0 X 100,0 MM
30.037.77007	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 6,5 X 65,0 MM

30.037.77008	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 6,5 X 70,0 MM
30.037.77009	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 6,5 X 75,0 MM
30.037.77010	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 6,5 X 80,0 MM
30.037.77011	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 6,5 X 85,0 MM
30.037.77012	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 6,5 X 90,0 MM
30.037.77013	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 6,5 X 95,0 MM
30.037.77014	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 6,5 X 100,0 MM
30.037.88007	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 6,0 X 65,0 MM
30.037.88008	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 6,0 X 70,0 MM
30.037.88009	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 6,0 X 75,0 MM
30.037.88010	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 6,0 X 80,0 MM
30.037.88011	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 6,0 X 85,0 MM
30.037.88012	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 6,0 X 90,0 MM
30.037.88013	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 6,0 X 95,0 MM
30.037.88014	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 6,0 X 100,0 MM
30.037.89007	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 6,5 X 65,0 MM
30.037.89008	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 6,5 X 70,0 MM
30.037.89009	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 6,5 X 75,0 MM
30.037.89010	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 6,5 X 80,0 MM
30.037.89011	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 6,5 X 85,0 MM
30.037.89012	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 6,5 X 90,0 MM
30.037.89013	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 6,5 X 95,0 MM
30.037.89014	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 6,5 X 100,0 MM
30.037.90007	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 7,0 X 65,0 MM
30.037.90008	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 7,0 X 70,0 MM
30.037.90009	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 7,0 X 75,0 MM
30.037.90010	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 7,0 X 80,0 MM
30.037.90011	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 7,0 X 85,0 MM
30.037.90012	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 7,0 X 90,0 MM
30.037.90013	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 7,0 X 95,0 MM
30.037.90014	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 7,0 X 100,0 MM
30.037.91007	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 7,5 X 65,0 MM
30.037.91008	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 7,5 X 70,0 MM
30.037.91009	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 7,5 X 75,0 MM
30.037.91010	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 7,5 X 80,0 MM
30.037.91011	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 7,5 X 85,0 MM
30.037.91012	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 7,5 X 90,0 MM
30.037.91013	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 7,5 X 95,0 MM
30.037.91014	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO Ø 7,5 X 100,0 MM
30.037.11013	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,0 X 65,0 MM
30.037.11014	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,0 X 70,0 MM

30.037.11015	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,0 X 75,0 MM
30.037.11016	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,0 X 80,0 MM
30.037.11017	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,0 X 85,0 MM
30.037.11018	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,0 X 90,0 MM
30.037.11019	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,0 X 95,0 MM
30.037.11020	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,0 X 100,0 MM
30.037.12013	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,5 X 65,0 MM
30.037.12014	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,5 X 70,0 MM
30.037.12015	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,5 X 75,0 MM
30.037.12016	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,5 X 80,0 MM
30.037.12017	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,5 X 85,0 MM
30.037.12018	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,5 X 90,0 MM
30.037.12019	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,5 X 95,0 MM
30.037.12020	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,5 X 100,0 MM
30.037.13013	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,0 X 65,0 MM
30.037.13014	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,0 X 70,0 MM
30.037.13015	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,0 X 75,0 MM
30.037.13016	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,0 X 80,0 MM
30.037.13017	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,0 X 85,0 MM
30.037.13018	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,0 X 90,0 MM
30.037.13019	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,0 X 95,0 MM
30.037.13020	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,0 X 100,0 MM
30.037.14013	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,5 X 65,0 MM
30.037.14014	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,5 X 70,0 MM
30.037.14015	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,5 X 75,0 MM
30.037.14016	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,5 X 80,0 MM
30.037.14017	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,5 X 85,0 MM
30.037.14018	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,5 X 90,0 MM
30.037.14019	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,5 X 95,0 MM
30.037.14020	PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,5 X 100,0 MM
30.037.01013	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,0 X 65,0 MM
30.037.01014	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,0 X 70,0 MM
30.037.01015	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,0 X 75,0 MM
30.037.01016	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,0 X 80,0 MM
30.037.01017	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,0 X 85,0 MM
30.037.01018	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,0 X 90,0 MM
30.037.01019	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,0 X 95,0 MM
30.037.01020	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,0 X 100,0 MM
30.037.02013	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,5 X 65,0 MM
30.037.02014	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,5 X 70,0 MM
30.037.02015	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,5 X 75,0 MM

30.037.02016	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,5 X 80,0 MM
30.037.02017	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,5 X 85,0 MM
30.037.02018	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,5 X 90,0 MM
30.037.02019	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,5 X 95,0 MM
30.037.02020	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,5 X 100,0 MM
30.037.03013	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,0 X 65,0 MM
30.037.03014	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,0 X 70,0 MM
30.037.03015	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,0 X 75,0 MM
30.037.03016	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,0 X 80,0 MM
30.037.03017	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,0 X 85,0 MM
30.037.03018	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,0 X 90,0 MM
30.037.03019	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,0 X 95,0 MM
30.037.03020	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,0 X 100,0 MM
30.037.04013	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,5 X 65,0 MM
30.037.04014	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,5 X 70,0 MM
30.037.04015	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,5 X 75,0 MM
30.037.04016	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,5 X 80,0 MM
30.037.04017	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,5 X 85,0 MM
30.037.04018	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,5 X 90,0 MM
30.037.04019	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,5 X 95,0 MM
30.037.04020	PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,5 X 100,0 MM
30.037.52013	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,0 X 65,0 MM
30.037.52014	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,0 X 70,0 MM
30.037.52015	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,0 X 75,0 MM
30.037.52016	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,0 X 80,0 MM
30.037.52017	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,0 X 85,0 MM
30.037.52018	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,0 X 90,0 MM
30.037.52019	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,0 X 95,0 MM
30.037.52020	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,0 X 100,0 MM
30.037.53013	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,5 X 65,0 MM
30.037.53014	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,5 X 70,0 MM
30.037.53015	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,5 X 75,0 MM

30.037.53016	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,5 X 80,0 MM
30.037.53017	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,5 X 85,0 MM
30.037.53018	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,5 X 90,0 MM
30.037.53019	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,5 X 95,0 MM
30.037.53020	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,5 X 100,0 MM
30.037.54013	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,0 X 65,0 MM
30.037.54014	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,0 X 70,0 MM
30.037.54015	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,0 X 75,0 MM
30.037.54016	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,0 X 80,0 MM
30.037.54017	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,0 X 85,0 MM
30.037.54018	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,0 X 90,0 MM
30.037.54019	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,0 X 95,0 MM
30.037.54020	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,0 X 100,0 MM
30.037.55013	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,5 X 65,0 MM
30.037.55014	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,5 X 70,0 MM
30.037.55015	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,5 X 75,0 MM
30.037.55016	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,5 X 80,0 MM
30.037.55017	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,5 X 85,0 MM
30.037.55018	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,5 X 90,0 MM
30.037.55019	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,5 X 95,0 MM
30.037.55020	PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,5 X 100,0 MM
30.037.62013	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,0 X 65,0 MM
30.037.62014	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,0 X 70,0 MM
30.037.62015	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,0 X 75,0 MM
30.037.62016	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,0 X 80,0 MM

30.037.62017	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,0 X 85,0 MM
30.037.62018	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,0 X 90,0 MM
30.037.62019	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,0 X 95,0 MM
30.037.62020	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,0 X 100,0 MM
30.037.63013	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,5 X 65,0 MM
30.037.63014	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,5 X 70,0 MM
30.037.63015	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,5 X 75,0 MM
30.037.63016	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,5 X 80,0 MM
30.037.63017	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,5 X 85,0 MM
30.037.63018	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,5 X 90,0 MM
30.037.63019	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,5 X 95,0 MM
30.037.63020	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 6,5 X 100,0 MM
30.037.64013	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,0 X 65,0 MM
30.037.64014	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,0 X 70,0 MM
30.037.64015	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,0 X 75,0 MM
30.037.64016	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,0 X 80,0 MM
30.037.64017	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,0 X 85,0 MM
30.037.64018	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,0 X 90,0 MM
30.037.64019	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,0 X 95,0 MM
30.037.64020	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,0 X 100,0 MM
30.037.65013	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,5 X 65,0 MM
30.037.65014	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,5 X 70,0 MM
30.037.65015	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,5 X 75,0 MM
30.037.65016	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,5 X 80,0 MM
30.037.65017	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,5 X 85,0 MM
30.037.65018	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,5 X 90,0 MM
30.037.65019	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,5 X 95,0 MM
30.037.65020	PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS FENESTRADO Ø 7,5 X 100,0 MM

2. Material (Composição)

As barras de união são fabricadas em Titânio Comercialmente Puro (TiCP), cujo a composição química e as propriedades físicas, mecânicas, metalúrgicas e biológicas de todos estes componentes são definidas de acordo com a ASTM F67 para o Grau 2. Os demais componentes do projeto são confeccionados em Liga de Titânio conforme ASTM F136, com um acabamento superficial polido e anodizado que conferem a alta qualidade

do implante A Tabela 2 apresenta a forma como a matéria-prima é disponibilizada para a fábrica.

Tabela 2 – Condição de fornecimento da matéria-prima das Fossas Condilares

Componente	Matéria-Prima	Condição
Barras de União – Escalonada, sextavada e convencional.	Ti-CP (ASTM F67)	Recozido/ Laminado ou Trefilado
Parafusos Pediculares, conectores, bloqueadores, Ganchos laterais, pediculares e laminares, Sistemas DTT – Gancho, parafuso e Barra.	Ti6Al4V (ASTM F136)	Recozido/ Laminado ou Trefilado

3. Dados do fabricante

OSTEOMED S.A.

CNPJ: 00.638.390/0001-20

Rodovia Washington Luís, Km 172., Condomínio CONPARK – Rio Claro/SP

CEP: 13501-600, TEL +55 (19) 3522-3064

e-mail: regulatórios@osteomedimplantes.com

Responsável Técnico: Engº Fernando Argenton Neto CREA/SP 0605005234

4. Fundamentos de seu funcionamento e mecanismo de ação

O uso do parafuso pedicular na população é eficaz e seguro no segmento toracolombar. Estudos evidenciam melhor correção coronal, assim como da lordose lombar para diversas patologias da coluna vertebral. A estabilização da coluna vertebral/Artrodese são procedimentos cirúrgicos na coluna vertebral realizados de forma convencional, com a inserção de parafusos e barras que promovem a estabilização da coluna vertebral, porém concebidos unicamente para auxiliar a regeneração óssea e não para substituir as estruturas normais do esqueleto humano, propiciando a artrodese (formação da ponte óssea/fusão). Os procedimentos podem ser realizados de forma isolada ou associados a outros procedimentos cirúrgicos da coluna, principalmente de descompressão, em diversos tipos de patologias. **Sistema de Fixação Pedicular Minimamente Invasivo – MINI-OSTEO** – dispositivo médico desenvolvido com o objetivo de promover a fixação e a estabilização de vértebras, porém concebidos unicamente para auxiliar a regeneração óssea e não para substituir as estruturas normais do esqueleto humano. Podem ser utilizadas as duas técnicas cirúrgicas, a convencional e minimamente invasiva, sendo esta escolha de responsabilidade do

médico cirurgião que deverá ter total conhecimento da técnica escolhida. Ao proporcionar estabilidade biomecânica, o implante proporciona de forma natural a regeneração do tecido ósseo (artrodese).

O sistema tem como seu uso pretendido direcionado a fixação, estabilização e correção até que haja a fusão óssea no local (artrodese), de acordo com a indicação de uso. Após ocorrer a consolidação, os implantes perdem a sua função mecânica de estabilização podendo até serem retirados se assim for necessário ou determinado pelo médico. Após a consolidação óssea o sistema, já sem função, mas sofrendo movimentação e consequentemente sujeito a cargas mecânicas, os parafusos pediculares podem vir a fraturar sem comprometer a estabilidade da região da coluna que serve de ancoragem, sendo que o sistema já perdeu a sua função de estabilização. Só raramente a fratura do implante lesiona as estruturas adjacentes.



Figura 1: Uma das possíveis montagens do Sistema Mini-OSTEO.

Para a montagem do Sistema é necessário o uso dos instrumentais fabricados pela Osteomed. O aperto final do sistema através do dispositivo de bloqueio deverá ser realizado utilizando-se o Torquímetro (Limitador de Torque) que está calibrado para o torque necessário para fixação sem comprometer os elementos parafuso e dispositivo de bloqueio, proporcionando a estabilidade do sistema. O médico deve conhecer a técnica cirúrgica bem como o uso dos instrumentais. A montagem do sistema deve

seguir o alinhamento geométrico entre os elementos (parafuso, bloqueio, barras) que proporcione o correto encaixe entre os implantes e o instrumental.

Via de Implantação: Posterior

Como as estruturas posteriores da coluna trabalham fisiologicamente em compressão, o **Sistema de Fixação Pedicular Minimamente Invasivo - MINI-OSTEO** é um implante para resistir preponderantemente a forças de compressão. O melhor ponto de ancoragem posterior é o pedículo. O tratamento cirúrgico vem sendo cada vez mais indicado para tratamento das lesões traumáticas da coluna. Esta abordagem mais agressiva garante restituição imediata da estabilidade do segmento lesionado, viabilizando início precoce dos programas de reabilitação, facilitando os cuidados de enfermagem e minimizando possíveis complicações decorrentes da imobilidade dos enfermos.

4.1. Compatibilidade entre Componentes e Ancilares

Todos os componentes são compatíveis entre si considerando-se a matéria-prima de constituição, ou seja, Liga de Titânio 6Al4V (conforme normas ASTM F136/NBR ISO 5832-3) e Titânio Puro TiCP (conforme normas ASTM F67/NBR ISO 5832-2).

Tabela 3 - Compatibilidade entre componentes e ancilares.

Componente	Compatível com:	Dimensão
PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS	Barras / Dispositivo de Bloqueio Mini-OSTEO / Gancho Lateral	Todas as dimensões compatíveis entre si
PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS	Barras / Dispositivo de Bloqueio Mini-OSTEO / Gancho Lateral	Todas as dimensões compatíveis entre si
PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO	Barras / Dispositivo de Bloqueio Mini-OSTEO / Gancho Lateral	Todas as dimensões compatíveis entre si
PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO	Barras / Dispositivo de Bloqueio Mini-OSTEO / Gancho Lateral	Todas as dimensões compatíveis entre si
PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS	Barras / Dispositivo de Bloqueio Mini-OSTEO / Gancho Lateral	Todas as dimensões compatíveis entre si

PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO MIS	Barras / Dispositivo de Bloqueio Mini-OSTEO / Gancho Lateral	Todas as dimensões compatíveis entre si
PARAFUSO MONOAXIAL LISTESE MINI-OSTEO	Barras / Dispositivo de Bloqueio Mini-OSTEO / Gancho Lateral	Todas as dimensões compatíveis entre si
PARAFUSO POLIAXIAL LISTESE MINI-OSTEO	Barras / Dispositivo de Bloqueio Mini-OSTEO / Gancho Lateral	Todas as dimensões compatíveis entre si
BARRA UNIAO MINI-OSTEO MIS	Parafusos / Dispositivo de Bloqueio Mini-OSTEO / Conectores de barras / Gancho DTT	Todas as dimensões compatíveis entre si
BARRA UNIAO MINI-OSTEO	Parafusos / Dispositivo de Bloqueio Mini-OSTEO / Conectores de barras / Gancho DTT	Todas as dimensões compatíveis entre si
BARRA UNIAO MINI-OSTEO SEXTAVADA	Parafusos / Dispositivo de Bloqueio Mini-OSTEO / Conectores de barras / Gancho DTT	Todas as dimensões compatíveis entre si
BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO Ø 5,5 X 3,18	Parafusos / Dispositivo de Bloqueio Mini-OSTEO / Conectores de barras / Gancho DTT	Todas as dimensões compatíveis entre si
BARRA UNIAO ESCALONADA MINI-OSTEO Ø 5,5 X 4,0	Parafusos / Dispositivo de Bloqueio Mini-OSTEO / Conectores de barras / Gancho DTT	Todas as dimensões compatíveis entre si
GANCHO DTT MINI-OSTEO	Barras / Barra DTT/ Parafuso DTT	Todas as dimensões compatíveis entre si
BARRA DTT PEDICULAR OSTEOM	Gancho DTT/ Parafuso DTT	Todas as dimensões compatíveis entre si
PARAFUSO DTT PEDICULAR OSTEOM/DPZ	Gancho DTT/ Barra DTT	Todas as dimensões compatíveis entre si
CONECTOR DE BARRAS	Barras de União / Dispositivos de Bloqueio para conectores /	Todas as dimensões compatíveis entre si
GANCHO LATERAL MINI-OSTEO	Parafusos / Dispositivos de Bloqueio Mini-OSTEO / Barras de União / Dispositivo de Bloqueio para conectores	Todas as dimensões compatíveis entre si
DISPOSITIVO DE BLOQUEIO MINI-OSTEO	Barras de União / Parafusos / Gancho Lateral	Todas as dimensões compatíveis entre si
DISPOSITIVO DE BLOQUEIO PARA CONECTORES	Conectores / Barras	Todas as dimensões compatíveis entre si
GANCHOS VERTEBRAIS	Dispositivo de Bloqueio / Barras	Todas as dimensões compatíveis entre si

PARAFUSO MONOAXIAL MINI-OSTEO MIS Fenestrados	Barras / Dispositivo de Bloqueio Mini-OSTEO / Gancho Lateral	Todas as dimensões compatíveis entre si
PARAFUSO POLIAXIAL MINI-OSTEO MIS Fenestrados	Barras / Dispositivo de Bloqueio Mini-OSTEO / Gancho Lateral	Todas as dimensões compatíveis entre si

5. Material de Apoio

Os materiais de apoio são os instrumentais designados unicamente para implantação dos componentes que integram o Sistema de Fixação Pedicular Minimamente Invasivo – MINI-OSTEO.

Esses instrumentais são fabricados com matérias-primas apropriadas para o uso, resistentes a ciclos de esterilização e não causam contaminação ao entrar em contato com o implante ou o paciente durante o uso. Os instrumentais em sua maioria são fabricados em aço inoxidável, matéria prima principal, que lhes conferem alta resistência e durabilidade, conforme requisitos especificados pela norma ASTM F-899 'Standard Specification for Stainless Steel for Surgical Instruments'.

Os instrumentais abaixo não são objetos desse registro devendo, portanto, serem adquiridos separadamente e sempre do mesmo fabricante do implante ou por fabricante indicado por esse.

Segue abaixo uma relação dos instrumentais disponibilizados pelo fabricante, ou por fabricante indicado por este, para a implantação dos modelos comerciais e acessórios que compõem o Sistema de Fixação Pedicular Minimamente Invasivo – MINI-OSTEO:

- Instrumental para Sistema de Fixação Pedicular Minimamente Invasivo – MINI-OSTEO.

Os instrumentais são fornecidos descontaminados, porém não esterilizados. Devendo ser esterilizados antes do uso conforme especificação determinada em sua instrução de uso. A esterilização inadequada do instrumental cirúrgico pode causar infecção.

Os instrumentos cirúrgicos estão sujeitos a desgastes durante a sua utilização normal podendo, portanto, apresentar falhas durante o período de serviço. Os instrumentais devem ser utilizados somente para os fins a que se destinam, devendo ser inspecionados regularmente para verificação de possíveis desgastes e danos. Caso

apresentem desgaste ou danos os mesmos não devem ser utilizados até que sejam reparados ou substituídos por novos.

Para mais informações acerca do instrumental, consulte o representante.

6. Indicação, finalidade ou uso a que se destina o dispositivo médico

O Sistema de Fixação Pedicular Minimamente Invasivo - MINI-OSTEO deverá ser utilizado para cirurgias da coluna vertebral nas regiões torácica, lombar e sacral. Cirurgia através do Sistema Minimamente Invasivo: com guias (fios guias), deverão ser utilizados os parafusos canulados e as barras curvas, por meio de técnicas cirúrgicas minimamente invasivas que propiciam uma segurança maior tanto para o cirurgião quanto para o paciente, diminuindo os danos causados a musculatura, acelerando o processo de recuperação do paciente. Cirurgia através do Sistema convencional: utilizando os parafusos não-canulados. Os implantes desenvolvidos neste projeto deverão ser usados em conjunto, cabendo ao cirurgião a escolha dos implantes corretos para melhor andamento da cirurgia e segurança do paciente.

A artrodese é um procedimento realizado para causar fusão óssea em uma articulação, causando sua imobilidade. A artrodese da coluna é um método de tratamento cirúrgico das doenças da coluna vertebral que causam instabilidade. Portanto ao realizar o procedimento, causa-se a estabilidade da coluna através da imobilidade de algum(s) de seu(s) segmento(s). Em geral, 2 a 3 segmentos da coluna podem ser artrodesados (fixados, fundidos) sem que haja prejuízo significativo da movimentação global da coluna, pois os segmentos sadios dão conta de realizar os movimentos mais importantes da coluna. Pacientes com dor ou sintomas neurológicos, que não melhoram com tratamento conservador podem ter indicação de artrodese caso apresentem os seguintes diagnósticos:

- *Deformidades – Escoliose;*
- *Deformidades Neuro Musculares*
- *Cifose*
- *Lordose*
- *Degenerativas - Revisões de Cirurgias*

- *Estenoses*
- *Espondilolisteses*
- *Degeneração de Disco Intervertebral*
- *Pseudoartroses*
- *Tumores – Recepção de Tumores*
- *Fraturas – Fraturas nas regiões torácicas e lombares*

O Sistema de Fixação Pedicular Minimamente Invasivo – MINI-OSTEO deverá ser utilizado por cirurgiões devidamente habilitados para tais procedimentos cirúrgicos, sendo que o aprendizado da técnica faz parte de sua formação profissional adquirida ao longo do período de residência médica. **Este produto não tem indicação para contato com meninges ou estruturas do sistema nervoso central.**

7. Contraindicações

O Sistema de Fixação Pedicular Minimamente Invasivo – MINI-OSTEO é contraindicado para a reconstrução óssea nos casos de:

- Infecções ativas.
- Pacientes que não são ou estão adeptas as instruções pós-operatórias devido deficiências físicas ou mentais.
- Sensibilidade a presença de materiais implantáveis.
- Quando houver suspeita de sensibilidade ao material, os testes apropriados devem ser realizados para excluir essa possibilidade antes do implante.
- Limitações no fluxo sanguíneo e/ou infecções anteriores que possam tornar a cicatrização lenta e aumentar a possibilidade de infecção e/ou rejeição dos implantes.
- Qualquer processo de doença degenerativa que possa afetar adversamente a colocação apropriada dos implantes.
- Cobertura inadequada com tecido saudável.
- Procedimentos nos quais haja uma ambiente não-estéril, ou seja, cavidades abertas como seios.
- Procedimentos diferentes daqueles indicados na sessão “Instruções de Uso”.

- Qualquer anormalidade presente que afete o processo normal de remodelamento ósseo, incluindo, mas não se limitando os seguintes efeitos:
 - osteoporose severa envolvendo a coluna;
 - absorção óssea;
 - osteopenia;
 - tumores primários;
 - infecções ativas no local;
 - distúrbios de metabolismo que afetem a osteogênese;
- Qualidade ou quantidade insuficiente de osso que impediriam a fixação rígida do implante.
- Histórico anterior de infecção;
- Paciente apresentar infecção sistêmica.
- Se houver inflamação local no sítio do osso.
- Se o paciente apresentar suspeita ou confirmação de alergia ou intolerância ao material.
- Se o paciente apresentando doença rápida progressiva nas articulações ou síndromes de absorção óssea como, por exemplo, doença de *Paget*, osteopenia, osteoporose, osteomielite etc.
- Na presença de déficits neural / vascular ou patologia associada que posteriormente possa ser lesada pelo uso do implante.
- Obesidade. Paciente acima do peso ou obeso pode produzir cargas sobre o implante que podem levar à falha de fixação dos implantes.
- Gravidez
- *O parafuso deve ser colocado em osso sem fratura (em condições de receber o implante sem comprometer sua função)*

Estas contraindicações podem ser relativas ou absolutas. No uso destes dispositivos deve cuidar-se contra as possíveis complicações e considerar o exame clínico completo e as contraindicações listadas anteriormente. Não aconselhamos a mistura de diferentes componentes biomédicos não compatíveis, tampouco produtos similares de terceiros, que podem elevar o risco de corrosão. Os resultados clínicos e durabilidade do implante dependerão da técnica cirúrgica adotada, que deverá ser adequada ao tipo de produto.

O uso é contraindicado para pacientes que apresentem outras condições médicas, cirúrgicas ou psicológicas que possam impedir os benefícios da cirurgia de fixação interna, tais como presença de tumores, anomalias congênitas, aumento não explicado do índice de sedimentação, aumento da contagem de leucócitos ou desvio significativo na contagem diferencial de leucócitos.

As utilizações, nos casos acima, podem provocar afrouxamento precoce do componente por excesso de solicitação, fratura por fadiga do implante, infecção ou luxação. Os implantes são utilizados para manter a correção da deformidade da coluna vertebral até que ocorra a fusão do segmento. O design do implante segue os princípios da biomecânica da coluna, proporcionando um maior índice de fusão e estabilidade de fixação, fabricado em vários diâmetros e comprimentos, com perfil de rosca preponderantemente esponjoso.

8. Precauções

As precauções para uso do Sistema de Fixação Pedicular Minimamente Invasivo – MINI-OSTEO incluem:

- Para assegurar a implantação adequada, somente deverão ser utilizados instrumentais cirúrgicos específicos, fabricados ou indicados pela Osteomed pois, a variação no projeto e dimensões dos instrumentais de outros fabricantes, podem comprometer os componentes e inviabilizar a implantação precisa;
- Todo cuidado deve ser tomado com relação à superfície dos componentes metálicos implantáveis, a fim de se evitar vincos, arranhões e/ou batidas, em regiões, tais como: porções rosqueadas, superfícies lisas, entre outros, para não comprometer a vida útil (desgaste precoce) e o encaixe de outros componentes que estiverem em contato com esta superfície (instrumentais), reduzindo assim as chances de eventuais quebras e/ou falhas prematuras;
- Por se tratar de produto comercializado na forma não-estéril, deve ser assegurado que todos os itens a serem implantados tenham sido esterilizados, conforme procedimento interno ou através dos parâmetros recomendados pela empresa e mantidos sob as condições adequadas para seu manuseio em ambiente cirúrgico, de acordo com as indicações da instrução de uso e presentes na rotulagem.

- O médico cirurgião deverá informar ao paciente sobre limitações e precauções a serem tomadas no período pós-operatório.
- Os parafusos jamais deverão ser conformados!
- **Não é recomendado a utilização de produtos implantáveis de outros fabricantes combinados aos produtos implantáveis da OSTEOMED.**
- Utilizar os instrumentais corretamente, para prevenir deformações, fissuras, movimentos ou migrações.
- Todo cuidado deve ser observado no encaixe e fixação dos componentes metálicos implantáveis a fim de se assegurar correto e eficaz montagem sem, contudo, danificar a superfície dos componentes;
- A cirurgia da coluna é um procedimento extremamente delicado seja qual for a técnica utilizada e a sua recuperação é lenta. O sucesso da cirurgia depende de vários fatores e está condicionado à ocorrência de uma fusão óssea (artrodese) que deve ocorrer no período de até um ano.
- “Este produto é considerado seguro condicionalmente à exposição à campos magnéticos oriundos de exames com tecnologia de ressonância magnética nuclear. Não deverá ser exposto à campos eletromagnéticos que excedam 3,0 Tesla.”

9. Restrições

As restrições para uso do Sistema de Fixação Pedicular Minimamente Invasivo – MINI-OSTEO incluem:

- O Sistema de Fixação Pedicular Minimamente Invasivo – MINI-OSTEO é constituída por componentes metálicos de forma a substituir e atuar como uma estabilização de segmentos vertebrais humanos, estando sujeito aos níveis de atividades e/ou cargas equivalentes à estrutura vertebral de um indivíduo saudável. Entretanto, o paciente deve ser informado sobre as limitações e cuidados pós-operatórios.;
- O cirurgião deverá alertar o paciente quanto a possível restrição de suas atividades durante o pós-operatório.
- Peças usadas, riscadas ou que tenham sofrido impacto (quedas) não deverão ser utilizadas.

- O Sistema de Fixação Pedicular Minimamente Invasivo – MINI-OSTEO não deverão ser implantados caso os pacientes possam colocar em risco o sucesso do procedimento durante o período de recuperação, como por exemplo, se debilitada ou incapacitada mentalmente.
- O Sistema de Fixação Pedicular Minimamente Invasivo – MINI-OSTEO deverá ser aplicado apenas por cirurgião habilitado para executar o procedimento. Este deverá também estar ciente dos aspectos mecânicos e metalúrgicos do sistema, a fim de instruir o paciente de como conduzir o período de recuperação com baixa probabilidade de falhas.
- Não utilizar junto ao Sistema de Fixação Pedicular Minimamente Invasivo – MINI-OSTEO componentes de outros sistemas que não sejam relacionados na instrução de uso. O uso de componentes estranhos ao sistema pode causar corrosão galvânica e promover a fratura dos implantes.
- Os componentes do Sistema de Fixação Pedicular Minimamente Invasivo – MINI-OSTEO jamais deverão ser reutilizados. Embora possam apresentar boas condições, o “stress” prévio pode criar imperfeições e/ou defeitos que podem provocar a falha ou redução prematura de sua vida útil.
- O Sistema de Fixação Pedicular Mini-OSTEO fornece uma ampla gama de tamanhos de parafusos, de forma a propiciar uma maior adaptação as diversas morfologias anatômicas distintas entre as mais diversas populações de pacientes bem como a adequabilidade às regiões distintas da coluna (regiões torácica e lombo-sacral). Desta forma, parafusos com dimensões menores são indicados à suportar carregamentos biomecânicos relativamente menores inerentes à sua região de implantação na coluna vertebral. Portanto, baseando-se nos critérios de aprovação estabelecidos e demonstrados no capítulo 3 deste Dossiê Técnico, estabelecem-se as seguintes restrições com relação aos parafusos constantes desta petição de registro:

Parafusos Convencionais – Sem canulação – Denominação Mini-OSTEO

Diâmetro do Parafuso (D)	Restrição
$\varnothing 3,5\text{mm} \leq D < \varnothing 5,5\text{mm}$	Uso na região torácica
Acima de $\varnothing 5,5\text{mm}$	Uso na região lombar e sacral

Parafusos Minimamente Invasivos – Com canulação – Denominação Mini-OSTEO MIS, Fenestrados e Não Fenestrados

Diâmetro do Parafuso (D)	Restrição
$\varnothing 4,5\text{mm} \leq D < \varnothing 6,5\text{mm}$	Uso na região torácica
$D \geq \varnothing 6,5\text{mm}$	Uso na região lombar e sacral

Entretanto, é sempre de responsabilidade do médico a escolha adequada do implante para cada paciente considerando o peso, atividade física, idade, condições da estrutura óssea e condições clínicas do paciente.

10. Advertências

As advertências para uso do Sistema de Fixação Pedicular Minimamente Invasivo – MINI-OSTEO incluem:

- O Sistema de Fixação Pedicular Minimamente Invasivo – MINI-OSTEO é de uso único, de reprocessamento proibido.
- Leia atentamente as informações que constam na instrução de uso.
- Não utilizar o produto se a embalagem primária e/ou secundária estiver violada.
- Cuidados no pós-operatório devem ser tomados, bem como a capacidade e disposição do paciente em seguir as instruções. O paciente deve ser alertado que o não atendimento às instruções pós-operatórias podem levar à quebra ou migração dos componentes implantáveis, requerendo nova cirurgia para revisão ou remoção;
- Os componentes desta prótese são fabricados com materiais não ferromagnéticos, portanto o paciente pode realizar exames de ressonância magnética. Contudo, o paciente deve informar ao técnico responsável pelo procedimento que possui um implante;
- Durante o exame de ressonância magnética poderá haver algum desconforto, como o aumento de temperatura do implante metálico.
- Características do paciente, como peso, estrutura muscular, estrutura óssea, atividades físicas e mastigatórias podem influenciar nos ciclos de carregamento

transferido aos implantes, podendo interferir no desempenho do implante em relação à resistência a fadiga.

- Embora com todo o desenvolvimento científico e tecnológico, os metais e suas ligas, quando implantados no organismo humano estão sujeitos a constantes mudanças ambientais (concentração de sais, ácidos e alcalinos) o que pode causar corrosão. A colocação de metais dissimilares em contato, uns com outros, pode acelerar o processo de corrosão, que por sua vez acentua a probabilidade de fratura por fadiga dos componentes metálicos implantáveis;
- Os componentes implantáveis podem entortar, soltar, quebrar, sofrer corrosão, causar dor, ou ainda, enfraquecer o osso, particularmente, em pacientes jovens e ativos;
- Pacientes fumantes, usuários de drogas, alcoólatras ou desnutridos devem ser advertidos sobre o aumento da incidência de não-união óssea;
- Noções de osteossíntese e de artroscopia devem ser de domínio do cirurgião para que o procedimento cirúrgico seja seguro e eficaz. Além disso, é fundamental que seja traçado um cuidadoso planejamento pré-operatório;
- Todo cuidado deve ser tomado no acesso cirúrgico para segurança do paciente e sucesso do procedimento;
- Antes de iniciar a cirurgia certifique-se de que a coleção de componentes implantáveis e o respectivo instrumental cirúrgico estejam íntegros, completos e estéreis.
- Antes de fazer uso dos componentes implantáveis do produto para saúde, certifique-se que a estrutura e condições ósseas do paciente suportam as dimensões estabelecidas nos componentes metálicos implantáveis escolhidos para tal procedimento.
- Fatores que devem ser analisados antes da cirurgia:
- O nível de atividade física do paciente, pois atividades excessivas podem levar a falha prematura do implante;
- O índice de massa corpórea do paciente, pois um paciente muito obeso pode produzir sobrecarga sobre o implante;
- Alcoolismo ou problemas mentais do paciente podem levá-lo a ignorar as limitações ou precauções no uso do implante;

- Enfermidades degenerativas podem diminuir consideravelmente a vida útil esperada de um implante ou mesmo a sua consolidação;
- Sensibilidade a corpos estranhos. Analisar a compatibilidade dos biomateriais (implantes) a serem utilizados na cirurgia com a estrutura óssea do paciente. A presença do implante pode causar dor, desconforto ou sensações anormais.
- **Nenhum implante deve ser reutilizado.**
- **É proibida a mistura de implantes de diferentes fabricantes.**
- Deve-se anotar o código de número de lote de cada implante utilizado.
- A não consolidação ou a consolidação retardada (Pseudoartrose) da estrutura óssea poderá levar a quebra do implante.

11. Potenciais eventos adversos e complicações

Os potenciais eventos adversos e complicações do uso do Sistema de Fixação Pedicular Minimamente Invasivo – MINI-OSTEO incluem:

- Soltura, migração, curvatura ou fratura dos componentes implantáveis;
- Infecção superficial ou profunda;
- Durante a implantação do componente podem ocorrer desordens vasculares, incluindo trombose e embolia pulmonar;
- Sensibilidade ao metal ou reação alérgica ao corpo estranho, podendo resultar em reações histológicas envolvendo vários tipos de macrófagos e fibroblastos, inclusive a possibilidade de formação de tumor e metalose;
- Diminuição da densidade óssea local devido ao “stress shielding”;
- Falha precoce ou tardia dos componentes implantáveis;
- Dor, desconforto ou sensações anormais em função da presença ou migração dos componentes metálicos implantáveis, e em função do procedimento cirúrgico;
- Dano neural ou neurológico em função do trauma cirúrgico, incluindo paralisia e lesões de partes moles;
- Pressão na pele devido aos componentes implantáveis ou suas partes estarem com a cobertura inadequada de tecidos sobre esses componentes, incluindo a possibilidade de extrusão completa ou parcial desses componentes;
- Não consolidação ou consolidação óssea retardada que poderá ocasionar à quebra ou soltura dos componentes metálicos implantáveis;

- Sensibilidade muscular ou de pele em pacientes que possuem uma cobertura inadequada de tecido no local operado;
- Pseudoartrose (não-união);
- Dificuldade ou incapacidade de executar atividades físicas diárias normais;
- Hemorragia dos vasos sanguíneos e/ou hematomas;
- Escaras;
- Cicatriz no local de inserção dos componentes implantáveis devido à via de acesso;
- Alergias ou outras reações (incluindo metalose) devido a partículas ou “debris” metálicas liberadas pelos componentes implantáveis.

Assim como em todos os procedimentos cirúrgicos há uma incidência de enfermidade e mortalidade. O paciente deve ser advertido pelo cirurgião sobre essa incidência e de todos os riscos advindos desse tipo de cirurgia.

12. Cuidados especiais durante transporte, armazenamento e manuseio.

Os cuidados especiais durante transporte, armazenamento e manuseio do Sistema de Fixação Pedicular Minimamente Invasivo – MINI-OSTEO incluem:

- O local de armazenamento deve estar limpo, seco, arejado e com adequada iluminação de forma a manter a sua integridade física e química;
- O serviço de transporte contratado deve ser informado sobre o conteúdo e prazo da entrega. Os cuidados a serem tomados no transporte estão demonstrados na caixa de papelão e na etiqueta de identificação, assegurando assim, proteção ao componente implantável desde a expedição até a entrega ao cliente.
- Deverá ser evitado durante o transporte: vibrações, choques, temperatura controlada (15°C – 40°C) e Umidade limite de (25% - 60%)
- Os componentes metálicos implantáveis devem ser manipulados com todo cuidado, de maneira a evitar choques bruscos, quedas e riscos e/ou imperfeições que afetem a qualidade dos mesmos e a segurança do usuário;
- A embalagem deve estar intacta no momento do recebimento.

12.1. Método de Esterilização

Os componentes do Sistema de Fixação Pedicular Minimamente Invasivo - MINI-OSTEO são fornecidos não estéreis. Antes da sua utilização, todos os componentes devem ser esterilizados por vapor utilizando os seguintes parâmetros:

Tabela 4: Parâmetros para o processo de esterilização por Autoclave.

Quesito	Parâmetro
Temperatura de trabalho	134°C ± 0,5°C
Tempo de pré-vácuo	5 minutos
Tempo de Esterilização	20 minutos
Tempo de Secagem	15 minutos
Pressão Câmara Interna	2,1 kgf/cm ² ± 0,2 kgf/cm ²
Pressão Câmara Externa	2,5 kgf/cm ² ± 0,2 kgf/cm ²

Seguir orientação técnica do fabricante do equipamento (Autoclave) e os procedimentos padrões para esterilização em produto médico Hospitalar. A Osteomed indica a esterilização dos componentes por uso de autoclave. Para que o processo de esterilização seja eficiente, as seguintes etapas deverão ser seguidas:

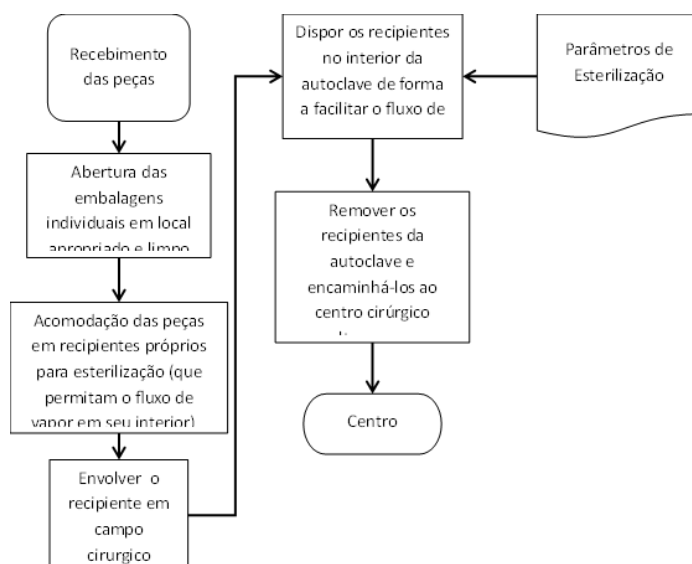
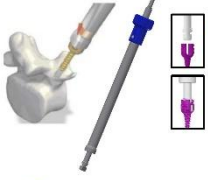
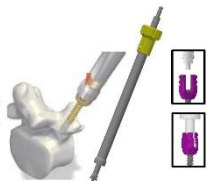
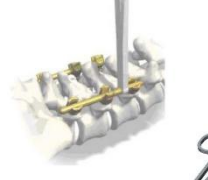


Figura 2: Fluxo para a realização do processo de esterilização.

Obs.: o roteiro e os parâmetros apresentados foram validados, seguindo a norma ABNT NBR ISO 17665-1: Esterilização de produtos para saúde — Vapor Parte 1: Requisitos para o desenvolvimento, validação e controle de rotina nos processos de esterilização de produtos para saúde, e aprovados.

13. Técnica Cirúrgica

A região anatômica, o tipo de fratura e os tecidos que envolvem a região da fratura/instabilidade/degeneração são dados de grande relevância para escolha adequada do implante e o procedimento cirúrgico mais apropriado. A técnica cirúrgica básica para aplicação dos Sistema de Fixação Minimamente Invasivo Mini-OSTEO segue os seguintes passos:

1	2
Sistema de Fixação Pedicular Mini Osteo  1. Fazer perfuração inicial do pedículo para quebra da cortical utilizando o Perfurador de Cortical (Curto e Longo).  2. Fazer perfuração do pedículo e corpo vertebral até a profundidade desejada utilizando o Probe Reto ou Curvo.	Sistema de Fixação Pedicular Mini Osteo  3. Utilizar o Apalpador para verificar a integridade das paredes do furo.  4. Para verificação da profundidade do furo utilize o Medidor de Profundidade Mini-Osteo.
Sistema de Fixação Pedicular Mini Osteo  7. Para auxiliar a visualização das furações utilizando intensificador de imagem pode-se utilizar as Agulhas Cabeça Redonda e Triangular. Obs.: O formato da cabeça tem a função de diferenciar o lado direito do esquerdo.  8. Selecionar o tipo de parafuso aplicável. Em caso de espondilolistese utilizar o Parafuso Pedicular Mini Osteo Listese. Nos demais casos utilizar os Parafusos Pediculares Poli e Monoaxial Mini-Osteo.	Sistema de Fixação Pedicular Mini Osteo  9. Caso seja selecionado o Parafuso Pedicular Monoaxial, realizar a inserção utilizando a Chave Introduzidora Parafuso Monoaxial Mini-Osteo.  10. Caso seja selecionado o Parafuso Pedicular Poliaxial, realizar a inserção utilizando a Chave Introduzidora Parafuso Poliaxial Mini-Osteo.
Sistema de Fixação Pedicular Mini Osteo  11. Ilustração da montagem final dos parafusos.  12. Para união dos parafusos deve-se utilizar a Barra de União. Caso seja necessário a conformação da barra utilizar o Modelador de Barras.	Sistema de Fixação Pedicular Mini Osteo  13. A Barra de União deve ser inserida utilizando a Pinça Porta Barra. 

Sistema de Fixação Pedicular Mini Osteo



14. Fixar preliminarmente o sistema introduzindo os Dispositivos de Bloqueio por meio da Pinça Hexalobular T-30°.

Obs. Importante a utilização do Gua para Dispositivo de Bloqueio Mini Osteo, pois este garante a montagem correta do Bloqueio no Parafuso.

Sistema de Fixação Pedicular Mini Osteo



15. Caso a Barra de União não encoste no alojamento do parafuso, pode-se utilizar o Aproximador de Barra Tipo Garfo para abaixar a barra até o parafuso e posteriormente fixar o bloqueio.

16. Opcionalmente o Aproximador de Barras Articulado pode ser utilizado para redução de listese.

Sistema de Fixação Pedicular Mini Osteo



17. Gire o manipulo no topo do Aproximador de Barras Articulado no sentido anti-horário de forma que a pinça se projete o máximo para fora. Conecte-o ao parafuso e dessa vez gire o manipulo no sentido horário até que o instrumento ofereça resistência.

18. Aplique pressão no cabo do instrumento de forma a aproximá-los, dessa forma o instrumento irá empurrar a barra contra o vale do parafuso.

Sistema de Fixação Pedicular Mini Osteo



19. Após o bloqueio do parafuso, realize o processo inverso para retirada do instrumento.

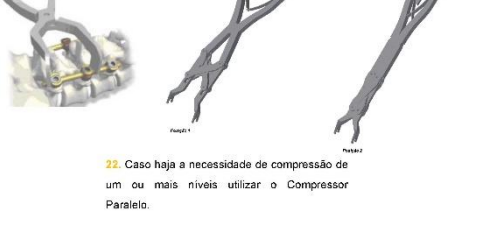
20. A Barra de União nunca deve ser colocada no Parafuso Pedicular Mini Osteo se a curva feita na barra impeça a perfeita fixação do Dispositivo de Bloqueio junto ao Parafuso.

Sistema de Fixação Pedicular Mini Osteo



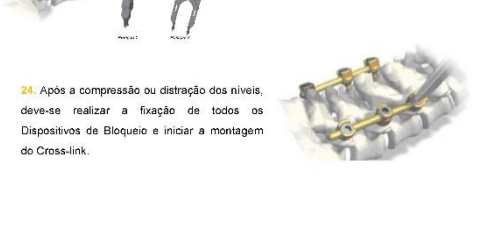
21. Apertar o Dispositivo de Bloqueio de uma das extremidades utilizando o Limitador de Torque e a Chave de Contra Torque.

Sistema de Fixação Pedicular Mini Osteo



22. Caso haja a necessidade de compressão de um ou mais níveis utilizar o Compressor Paralelo.

Sistema de Fixação Pedicular Mini Osteo



23. Caso haja a necessidade de distração de um ou mais níveis utilizar o Distrator Paralelo.

24. Após a compressão ou distração dos níveis, deve-se realizar a fixação de todos os Dispositivos de Bloqueio e iniciar a montagem do Cross-link.

Sistema de Fixação Pedicular Mini Osteo



25. Sistema DTT (Cross-link)

- 1 Barra DTT;
- 2 Ganchos DTT;
- 2 Parafusos DTT

26. Conectar o Gancho DTT à barra utilizando a Pinça Porta Barra DTT. Obs.: O Gancho DTT deve ser inserido à barra de forma que o semilhado fique voltado para cima.



Tais procedimentos poderão ser realizados unicamente por profissional com conhecimento pleno nos procedimentos cirúrgicos a fim de evitar ou reduzir eventuais sequelas. É de grande importância que o profissional seja treinado e/ou tenha familiaridade com os produtos a serem implantados e com a técnica cirúrgica.

13.1. Critério de seleção, limite de conformação mecânica ou modelagem dos produtos metálicos implantáveis e cargas suportadas.

O Sistema de Fixação Pedicular Minimamente Invasivo – MINI-OSTEO foi projetado e fabricado de forma a eliminar ou reduzir os riscos de lesões vinculados a sua caracterização física e biomecânica. **É de responsabilidade do cirurgião a escolha adequada do implante** considerando as indicações, advertências, restrições, precauções, cuidados especiais e contraindicações definidas neste relatório técnico. Os componentes do Sistema de Fixação Pedicular Minimamente Invasivo – MINI-OSTEO não deverão ser modelados em nenhuma condição.

14. Remoção e Descarte do Dispositivo

- Por se tratar de um procedimento cirúrgico, devem ser considerados todos os riscos relacionados a tal procedimento. O período pós-cirúrgico demanda cuidados para que não ocorra uma ampliação da lesão caso seja necessária a troca da prótese.
- Quando necessário à retirada da prótese do paciente, deverá ser seguido procedimentos definidos no Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) (RDC 222/2018) para dar o melhor destino ao material extraído, que se caracteriza como lixo hospitalar potencialmente contaminante.
- Implantes que forem removidos da embalagem primária e inseridos dentro do ambiente cirúrgico, mesmo que não tenham sido implantados ou entrado em contato com fontes contaminantes, devem ser tratados como lixo hospitalar.
- Esses dispositivos devem ser inutilizados/descaracterizados para uso antes do descarte. A descaracterização do produto médico é de inteira responsabilidade da instituição hospitalar, assim como os métodos e procedimentos de descarte utilizados. Entretanto, a OSTEOMED recomenda que tais produtos médicos sejam deformados mecanicamente, através da utilização de prensa de impacto, martelo ou marreta. Em seguida, os produtos médicos devem ser identificados de forma clara e visível, indicando a sua situação, ou seja, impróprio ao uso.
- Os métodos e procedimentos de descarte do produto médico utilizado devem assegurar a completa descaracterização, impedindo qualquer possibilidade de sua reutilização.
- Após a sua remoção, os componentes implantáveis deverão ser limpos e esterilizados.
- No caso de implantes metálicos, após ser removido, este deverá ser limpo com água, solução aquosa 70% a 80% de etanol ou isopropanol e subsequente tratamento ultrassônico ou com enzima proteolítica ou solução 1:100 de hipoclorito de sódio.
- A esterilização do implante removido para descarte deverá ser feita por meio de autoclave ou qualquer outro método que garanta a esterilização eficaz antes do descarte do implante. Para maiores informações em relação a este processo, poderá ser consultada a norma ISO 17665-1: Esterilização de produtos para

saúde — Vapor Parte 1: Requisitos para o desenvolvimento, validação e controle de rotina nos processos de esterilização de produtos para saúde.

- Para o envio desses produtos médicos removidos de pacientes ao fabricante, devem ser utilizadas embalagens que mantenham sua integridade. Na embalagem devem constar informações sobre as condições desses produtos, tais como: método de limpeza e desinfecção utilizado, assim como sua identificação.

15. Formas de apresentação do produto médico;

O Produto é comercializado na forma não estéril, em embalagens primárias e secundárias.

15.1. Rotulagem

A seguir um exemplo da etiqueta de identificação do produto (Figura 3). A etiqueta de identificação do produto contém as seguintes informações:

- (01) Componente (descrição);
- (02) Código componente (REF);
- (03) Lote (LOT);
- (04) N° Ordem de fabricação (OF);
- (05) Material (Mat. Prima);
- (06) Quantidade;
- (07) N° Registro ANVISA;
- (08) Data de fabricação;
- (09) Data de validade;
- (10) Nome comercial;
- (11) Nome Técnico;
- (12) Informação sobre condição de esterilização;
- (13) Simbologia informativa;
- (14) GS1 Data Matriz;

(15) Local de disponibilização da instrução de uso eletrônica;

(16) Responsável técnico.

		OSTEOMED S.A. CNPJ: 00.638.390/0001-20		AFE: 800.719-1	
RODOVIA WASHINGTON LUIZ (SP 310) KM 172 - PISTA SUL JARDIM ANHANGUERA CONDOMÍNIO CONPARK CEP: 13501-600 - RIO CLARO - SP - BRASIL TEL: +55(19)3522-3064					
01	COMPONENTE:		03	04	05
02	REF	LOT	OF:	MAT. PRIMA:	QUANTIDADE:
07	REGISTRO ANVISA Nº:		FABRICAÇÃO:		VALIDADE:
10	NOME COMERCIAL:		08	09	
11	NOME TÉCNICO:				
12	NÃO ESTÉRIL - ESTERILIZAR ANTES DO USO PRODUTO DE USO ÚNICO - PROIBIDO REPROCESSAR				
13					
15	Instrução de uso vigente conforme data de fabricação em: http://www.osteomedimplantes.com/instrucoes/ Se necessário, solicitar versão impressa no SAC: (19) 3522-3064				
16	INDICAÇÃO, ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO, MANIPULAÇÃO, ADVERTÊNCIA PRECAUÇÕES E ESTERILIZAÇÃO: VER INSTRUÇÕES DE USO RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGº FERNANDO ARGENTON NETO CREA/SP-060.500.532-4				

Figura 3 - Rótulo do Produto (imagem meramente ilustrativa).

Dentro de cada embalagem são colocadas 5 (cinco) etiquetas de identificação, com informações para rastreabilidade, conforme Resolução RDC nº 594, de 28 de dezembro de 2021 a qual solicita no mínimo 3 (três) etiquetas. Sendo, obrigatória a fixação:

- 1) No prontuário clínico do paciente;
- 2) No documento entregue para o paciente;
- 3) Na documentação fiscal que gera a cobrança, na AIH (Autorização de Internação Hospitalar), no caso de paciente atendido pelo SUS, ou na nota fiscal de venda, no caso de paciente atendido pelo sistema de saúde complementar;

Quanto as 2 etiquetas adicionais, recomenda-se:

- 4) Disponibilizar para o controle do fornecedor (registro histórico de distribuição – RHD);
- 5) Disponibilizar para o controle do cirurgião responsável (principal).

15.2. Embalagem

15.2.1. Não Estéril

Os implantes são embalados individualmente em tubo plástico fechado (selado a quente), acondicionado, sendo fechado por termosselagem e armazenado em caixa de papelão com dimensões adequadas para protegê-lo de choques e quebras até o momento do uso. A Embalagem é transparente, lisa, tubular fabricada em polietileno de baixa densidade industrial e atóxico. Verificação do estado da embalagem e da superfície do produto - caracterizar a necessidade de desqualificação do produto no caso de acidentes de manuseio e transporte que restrinjam seu uso. Embalagens desenvolvidas segundo norma ABNT NBR 15165 - Implantes ortopédicos – Requisitos gerais para marcação, embalagem e rotulagem.



Figura 4 - Embalagem em Polímero PEBD (imagem meramente ilustrativa).



Figura 5 - Identificação das embalagens primarias e secundarias (imagem meramente ilustrativa).

As embalagens são distribuídas/transportadas dentro de caixas de papelão identificado com o nome da empresa, endereço e com os dizeres “produto hospitalar”, conforme ilustra a Figura 6.



Figura 6 - Caixa de papelão para distribuição dos produtos (imagem meramente ilustrativa).

15.3. Rastreabilidade

Os componentes do Sistema de Fixação Pedicular Minimamente Invasivo – MINI-OSTEO possuem os seguintes dados gravados em seu corpo para devida identificação:

- Logomarca - 
- Nome do Componente
- Matéria-Prima – T(Titânio e suas ligas) 2(Titânio ASTM F67/ISO 5832-2/TiCP) ou 3(Liga de titânio ASTM F136/ISO 5832-3/Ti6Al4V)
- Lote – letra L seguida por mais sete algarismos (ex: L.XXXXXXX)

A marcação é feita através do processo de gravação a LASER e segue conforme a NBR ISO 12932 – Implantes para Cirurgia – Materiais Metálicos – Preparação de superfície e Marcação seguindo, NBR ISO 14630 – Implantes Cirúrgicos não ativos – Requisitos Gerais e NBR 15165 - Implantes ortopédicos – Requisitos gerais para marcação, embalagem e rotulagem.

16. Instrução de Uso

Conforme descrito no artigo 50 da RDC Nº 751, de 15 de setembro de 2022, as instruções de uso em formato não impresso poderão ser fornecidas em mídias físicas ou disponibilizadas na Internet ou em outro formato que contemple todas as exigências desta Resolução. Portanto, o fabricante disponibiliza a instrução de uso por meio de seu site, disponível em: https://osteomedimplantes.com/instrucoes_de_uso

17. Nota de Orientações específicas ao médico referente ao relato de eventos adversos e queixas técnicas

Caso o produto apresente eventos adversos não relatados na instrução de uso ou tenha queixas técnicas sobre o produto, o médico deverá entrar imediatamente em contato com o fabricante através do departamento de pós-vendas da Osteomed (via e-mail: posvendas@osteomedimplantes.com – regulatorio@osteomedimplantes.com) e/ou (contato telefônico: 19 3522-3064), além de notificar imediatamente a autoridade sanitária competente, ANVISA, por meio das opções a seguir:

Profissional de saúde: <https://notivisa.anvisa.gov.br/frmLogin.asp>

Cidadão: <https://enotivisa.anvisa.gov.br/login>

e-mail: tecnovigilancia@anvisa.gov.br (dúvidas e problemas de acesso ao NOTIVISA)

Maiores informações podem ser encontradas no site da ANVISA - <https://www.gov.br/anvisa/pt-br> buscando pelo assunto Notificações ou NOTIVISA (Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária).

Para assegurar a rastreabilidade do produto, o médico deverá informar os dados de rastreabilidade do produto. A rastreabilidade do produto é assegurada através das 05 etiquetas de rastreabilidade fornecidas dentro da embalagem com o produto.

18. Reclamação do Cliente

Caso o produto médico apresente um risco imprevisível específico, esteja fora de suas especificações ou esteja gerando qualquer insatisfação, entrar imediatamente em contato com o fabricante através do departamento de pós-vendas da Osteomed (via e-mail: posvendas@osteomedimplantes.com – regulatorio@osteomedimplantes.com) e/ou (contato telefônico: 19 3522-3064), para iniciar as tratativas conforme os procedimentos internos estabelecidos (BPF). O produto deverá ser mantido identificado e segregado no cliente, posteriormente encaminhado a Osteomed para análises técnicas e feedback dos resultados.

19. Referências Bibliográficas

Augustus A. White III, Manohar M. Panjabi / Clinical Biomechanics of the Spine Padrões Internacionais para Classificação Neurológica e Funcional de Lesões na Medula Espinhal – American Spinal Injury Association International Medical Society of Paraplegia ASIA / IMSOP.

Frymover J.W. The Adult Spine Principles and Practice, 2nd edition, Chapter 105 Willis C. Campbell, M.D. – Cirurgia Ortopédica de Campbell oitava edição. Editora Manole Ltda.

Robert B. Winter, M.D. ; John W. Lonstein, M.D.; Francis Denis, M.D.; Michael D. Smith, M.D. - Atlas de Cirurgia da Coluna Vertebral – Editora Revinter SPINE / Orthopaedic Surgery Essentials Book editors, Christopher M. Bono, Steven R. Garfin

CIRURGIA ORTOPÉDICA DE CAMPBELL - OITAVA EDIÇÃO Autor : WILLIS C. CAMPBELL , M.D. EDITORA MANOLE LTDA Volume V – Parte XVIII – Coluna Vertebral - Página 3857 – Tipos de Artrodese Anterior da Coluna Vertebral Cervical.

Suken A. Shah, MDa,* , Arjun A. Dhawale, MDa, Jon E. Oda, MDb, Petya Yorgova, MSa, Geraldine I. Neiss, PhDa, Laurens Holmes, Jr., PhD, DrPHa, Peter G. Gabos, MDa “Ponte Osteotomies With Pedicle Screw Instrumentation in the Treatment of Adolescent Idiopathic Scoliosis”, Spine Deformity, 2013 pp. 196-204

Daniel Hedequist, MD*, John Emans, MD, "Anterior Exposures of the Pediatric Spine and Posterior Pedicle Screw Instrumentation", Neurosurgery Clinics of North America, ed. 18, 2007, pp. 681-695

Richard M. Schwend, M.D., Sreeharsha, V. Nandyala, B.S. “Current State of Pedicle Screw Constructs in Children with Spinal Deformity, Seminars in Spine Surgery, ed. 24, pp. 192-201

Terry L. Mueller, DO, Nancy H. Miller, MD David M. Baulesh, BA, Laurel H. Hastings, BA, Franklin M. Chang, MD, Gaia Georgopoulos, MD, Elise M. Benefield, RN, Zhaoxing Pan, PhD, Mark A. Erickson, MD, “The safety of spinal pedicle screws in children ages 1 to 12”, The Spine Journal 13, (2013) pp. 894-901.

Marcel Dreischarf, Antonius Rohlmann, Georg Bergmann, Thomas Zander, “Optimised



Osteomed S.A.

Rodovia Washington Luís, Km 172.
Condomínio CONPARK – Rio Claro/SP
CEP: 13501-600, +55(19) 3522-3064
CNPJ: 00.638.390/0001-20
www.osteomedimplantes.com

loads for the simulation of axial rotation in the lumbar spine”, Journal of Biomechanics, ed. 44 (2011), pp. 2323-2327



OSTEOMED S.A.

Rodovia Washington Luís (SP 310), Pista Sul, Km 172 – Rua 6 S/N - Jd Anhanguera -
Condomínio Conpark Rua 6 S/N Rio Claro SP - CEP 13.501- 600
Tel. (19) 3522-3064 - E-mail: administrativo@osteomedimplantes.com
MS 800719-1/Registro ANVISA nº **80071910053**
Tec. Resp.: Engº Fernando Argenton Neto – CREA 060.500.523.4